

## Fiebermess-Streifen für die Stirn 10er-Set

### Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Fiebermess-Streifen. Mit diesen praktischen Helfern haben Sie Ihre Körpertemperatur immer im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Fiebermess-Streifen optimal nutzen können.

### Lieferumfang


- 10 Fiebermess-Streifen
- Bedienungsanleitung

### Anwendung

Bevor Sie mit dem Fiebermessen beginnen, sollte der Erkrankte sich etwa fünf Minuten lang ausgeruht haben. Warten Sie nach Mahlzeiten oder körperlicher Anstrengung etwa 30 Minuten. Wenn Sie bereit sind zum Fiebermessen drücken Sie den Messstreifen für 15 Sekunden auf die TROCKENE Stirn des Erkrankten. Der Messstreifen verfärbt sich je nach Körpertemperatur.

### Auswertung

Anhand der Farbskala der Messstreifen können Sie die Temperatur ablesen. ② und ③ zeigen korrekte Messwerte, wobei ② den Wert 36,5°C darstellt. Bei ① liegt eine fehlerhafte Messung vor.

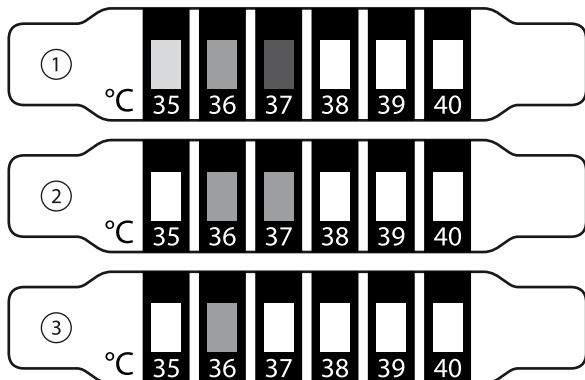

### Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



#### ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
Der Einsatz dieses Produktes ist kein Ersatz für  
Arztbesuche!*



## 10 thermomètres frontaux pour fièvre

### Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Avec ce produit pratique, vous connaissez rapidement la température de votre corps.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 10 thermomètres frontaux
- Mode d'emploi


### Utilisation

Avant de faire la mesure, le malade doit rester tranquille pendant environ cinq minutes. Après un effort ou un repas, attendez environ 30 minutes.

Quand vous êtes prêt, placez le thermomètre durant 15 secondes sur votre front SEC. Le thermomètre se colore selon la température du corps.

### Résultats

Selon l'échelle de couleur du bandeau, vous pouvez connaître la température. ② et ③ indiquent une mesure réussie et ② équivaut à 36,5°C. Le chiffre ① indique une mesure ratée.

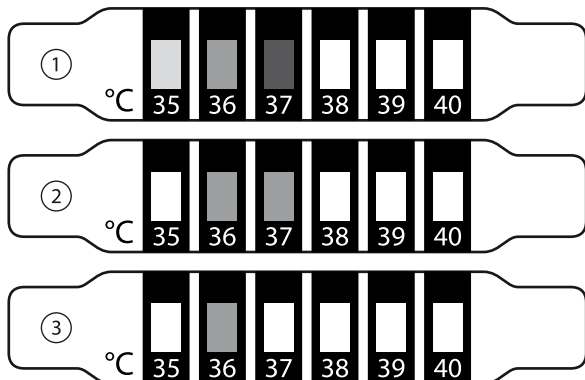

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.



#### ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.*

*Sous réserve de modification et d'erreur!*

*Ce produit ne dispense pas d'un visite chez le médecin !*