

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Wärmekompresse. Diese praktische Kompresse können Sie bis zu 3000 Mal wieder verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wärmekompresse optimal einsetzen können.

Verwendung

1. Knicken Sie das Metallplättchen in der Wärmekompresse ein oder zweimal, damit die Flüssigkeit kristallisiert.
2. Die chemische Reaktion erwärmt nun die Kompresse, durch gelegentliches Kneten hält die Wärme länger.
3. Um die Wärmekompresse erneut einzusetzen, legen Sie diese für ungefähr 10 Minuten in kochendes Wasser, bis sich die Kristalle wieder vollständig verflüssigt haben. Die Wärmekompresse ist ungefähr 3000 mal nutzbar.



ACHTUNG:
VERBRENNUNGSGEFAHR! Legen Sie die Kompresse nicht direkt nach dem Entnehmen direkt auf die Haut.

Inhaltsstoffe: Natriumacetat (nicht giftig), Wasser, Metallplättchen



ACHTUNG:
Öffnen Sie die Wärmekompresse niemals und verwenden Sie die Wärmekompresse nicht, wenn deren Hülle beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!.