

Bluetooth-4.0-Fitness-Armband FBT-60.BD

mit Blutdruck- & Herzfrequenz-Messung, IP67

Schnellstartanleitung



NX-4351-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues Fitnessarmband	6
Lieferumfang	7
Optionales Zubehör	7
Wichtige Hinweise zu Beginn	8
Sicherheitshinweise	8
Gesundheitshinweise	9
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	10
Konformitätserklärung	11
Produktdetails	12
Inbetriebnahme	13
Akku laden	13
App installieren	14
Verwendung	15

Einschalten	15
Mit Mobilgerät verbinden	15
Ausschalten	16

Technische Daten	17
-------------------------------	-----------

IHR NEUES FITNESSARMBAND

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Fitnessarmbands. Mit ihm haben Sie alles im Blick: Schrittzahl, Kalorienverbrauch, Entfernung, Schlaf, Puls, Blutdruck und Sauerstoffgehalt im Blut. Die Herzfrequenzmessung erfolgt automatisch alle 60 Minuten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fitnessarmband optimal einsetzen können.



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4351 ein.

Lieferumfang

- Fitnessarmband
- Lade-Clip
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 8.0 und Bluetooth 4.0
Kostenlose App **Wearfit**

Optionales Zubehör

USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringerer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Gerät ist gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. Tauchen Sie es niemals längere Zeit in Wasser und niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!

- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gesundheitshinweise

Puls, Blutdruck und Sauerstoffgehalt des Blutes werden mit Hilfe der App ermittelt. Sie dienen nur der Referenz, nicht der medizinischen Diagnose. Verwenden Sie die Resultate nicht zu Eigendiagnose oder als Behandlungsbasis. Personen, die an Kreislauf- oder Blutdruckstörungen leiden, sollten unter ärztlicher Aufsicht bleiben.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4351-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer **NX-4351** ein.

PRODUKTDDETAILS

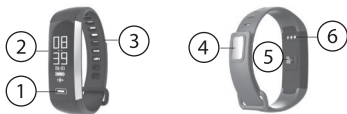

1. Funktionsfeld
2. Display
3. Armband
4. Verschluss
5. Herzfrequenz-Sensor
6. Ladekontakte

INBETRIEBNAHME

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 1,5 Stunden lang auf.

1. Setzen Sie den Lade-Clip so an Ihrem Fitnessarmband an, dass Lade-Pins und Ladkontakte passend aufeinander liegen.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Lade-Clips mit einem geeigneten USB-Netzteil (z.B. SD-2201). Auf dem Display wird kurz eine Lade-Animation angezeigt.
3. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation stillsteht und der Balken vollständig gefüllt ist.



HINWEIS:

Tippen Sie kurz auf das Funktionsfeld, um die Lade-Animation erneut aufzurufen.

App installieren

Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) nach der App **Wearfit**. Installieren Sie diese auf dem Mobilgerät.

VERWENDUNG

Einschalten

Schalten Sie Ihr Fitnessarmband ein, indem Sie das Funktionsfeld vier Sekunden lang antippen. Ihr Fitnessarmband vibriert, das Display wird eingeschaltet.

Mit Mobilgerät verbinden



HINWEIS:

Das Mobilgerät muss über Bluetooth 4.0 verfügen.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts und öffnen Sie die App. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Fitnessarmband mit dem Mobilgerät zu verbinden.




ACHTUNG

Die Bluetooth-Verbindung erfolgt über die App. Verbinden Sie die Geräte NICHT über das Bluetooth-Menü des Mobilgeräts!

Ausschalten

1. Tippen Sie vier Sekunden auf das Funktionsfeld. Folgendes Display erscheint:

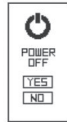

2. Tippen Sie auf das Funktionsfeld, um die Option **YES** auszuwählen. Die Auswahl wird farblich markiert.
3. Tippen Sie dann erneut vier Sekunden lang auf das Funktionsfeld. Ihr Fitnessarmband vibriert, das Display erlischt. Ihr Fitnessarmband ist ausgeschaltet.

TECHNISCHE DATEN

Li-Po-Akku	85 mAh
Ladestrom	5 V DC / 0,5 A
Ladezeit	1 – 2 Stunden
Standby-Zeit	bis zu 7 Tage
Betriebszeit	bis zu 3 Tage
Bluetooth	4.0
Funk-Frequenz	2.400 – 2.4835 GHz
max. Sendeleistung	4 dBm
Funktionen	Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Entfernung, Schlafmonitor, Puls, Blutdruck, Sauerstoffgehalt, Wecker, Bewegungserinnerung, Suchfunktion
Schutzart	IP67

Maße	200 × 19,7 × 11,2 mm
Gewicht	20,5 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 / 10.03.2017 - ExCB//BS//MF