

# WLAN-Personenwaage

mit 8-fach-Körperanalyse und App, bis 155 kg

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihre neue WLAN-Personenwaage</b> .....	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
Optionales Zubehör .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn</b> .....	<b>5</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	6
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails</b> .....	<b>7</b>
Waage .....	7
Display-Anzeigen .....	7
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
Batterien einsetzen / wechseln .....	8
App installieren .....	8
Ersteinrichtung .....	8
Datenschutz .....	10
<b>Verwendung</b> .....	<b>10</b>
Beim Gebrauch mit mehreren Benutzern .....	10
Messen .....	11
Automatische Körpererkennung ein-/ausschalten .....	12
Messergebnis zuordnen .....	13
Gewichts-Analyse .....	13
Einstellungen .....	14
Geräte-Einstellungen .....	14
Messeinheiten .....	14
WLAN-Einstellungen .....	15
App-Einstellungen .....	15
Allgemein .....	15
Mit anderen Diensten verknüpfen .....	15
Abmelden .....	15
Waage aus App entfernen .....	16
Fehlermeldungen im Waage-Display .....	16
<b>Weiteres Gerät mit App verbinden</b> .....	<b>16</b>
<b>Problemlösungen</b> .....	<b>17</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihre neue WLAN-Personenwaage

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Personenwaage. Verbinden Sie die Waage mit der App und lassen Sie sich eine Analyse inklusive Erklärungen zu BMI, Körperfettanteil, Muskelmasse, Körperwasser, Knochenanteil, viszeralen Fettgehalt und Stoffwechsel anzeigen. Die Waage kann von der gesamten Familie genutzt werden, ohne ständig zwischen Benutzern in der App wechseln zu müssen. Denn die Waage verfügt über eine automatische Körpererkennung mit deren Hilfe die Messergebnisse automatisch den wahrscheinlichsten Nutzern zugeordnet werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue WLAN-Waage optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- WLAN-Personenwaage
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt

- 4 x Batterien Typ AAA (z.B. PX-1565)
- Mobilgerät mit Android ab 4.3 oder iOS ab 8.0
- Empfohlene App: Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Zeroner Health Pro** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).

## Optionales Zubehör

NX-4399: GPS-Sportuhr

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt dient der generellen Messung von Körpergewicht und Körperfett. Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.
- Wenn Sie das Produkt einer Betriebs- (0°-40°C) oder Lagertemperatur (-20° bis 40°C) aussetzen, die sich außerhalb des zugelassenen Rahmens befindet, so kann dies die Messergebnisse verfälschen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassem oder rutschigen Untergrund. Es besteht die Gefahr auszurutschen und zu fallen.
- Verwenden Sie die Waage nicht, wenn Sie nass sind. Trocknen Sie sich nach dem Baden oder Duschen gut ab, insbesondere die Fußsohlen, bevor Sie sich auf die Waage stellen.
- Stellen Sie sich nicht auf den Rand der Waage und springen Sie nicht auf die Waage. Die Waage könnte kippen – Fall- und Verletzungsgefahr!
- Stellen Sie das Produkt immer auf einen flachen, festen und trockenen Untergrund.
- Ziehen Sie vor dem Wiegen Schuhe und Socken aus. Platzieren Sie Ihre Füße richtig auf den Elektroden und halten Sie das Gleichgewicht.
- Verwenden Sie die Waage nicht auf weichem Untergrund wie z.B. Teppichen, Handtüchern, etc.

- Personen mit Herzschrittmachern oder anderen transplantierten medizinischen Geräten dürfen diese Waage nicht verwenden.
- **WARNUNG:** Das Gerät lässt elektrischen Strom durch den Benutzer fließen, um Messungen durchzuführen. Das Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten verwendet werden. Lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie schwanger sind oder schwanger sein könnten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4436-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4436 ein.

## Produktdetails

### Waage

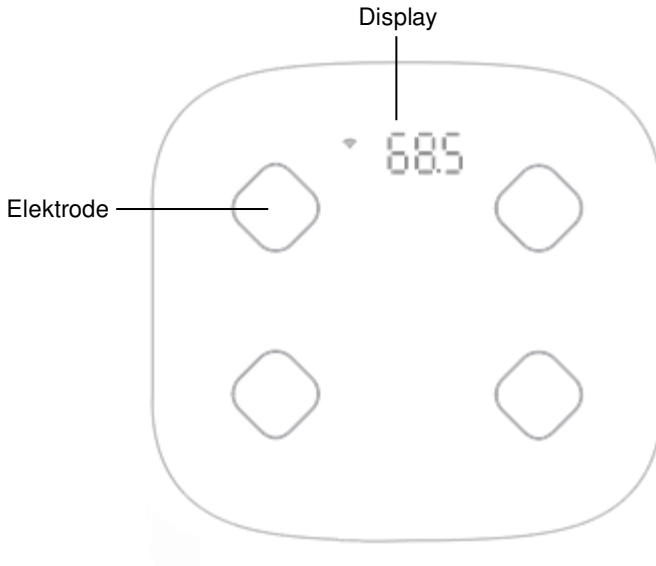

### Display-Anzeigen



Netzwerk wird  
eingerichtet



WLAN-Einrichtung  
fehlgeschlagen



WLAN-Verbindung



Netzwerk-Einrichtung  
erfolgreich

## Inbetriebnahme

### Batterien einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie die Waage um und öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie es in Pfeilrichtung aufschieben.
2. Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien.
3. Setzen Sie vier neue Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach!
4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder passend ein und schieben Sie sie gegen Pfeilrichtung zu.

### App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Zeroner Health Pro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

### Ersteinrichtung



**HINWEIS:**

*Falls Sie bereits über ein Benutzerkonto verfügen (z.B. weil Sie im Besitz der GPS-Sportuhr NX-4399 sind), gehen Sie bitte vor wie im Abschnitt **Weiteres Gerät mit App verbinden** beschrieben.*

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, in das Ihre Waage eingebunden werden soll.



**HINWEIS:**

*Ihre Waage kann nicht in ein 5-GHz-Netzwerk eingebunden werden.*

2. Öffnen Sie die App **Zeroner Health Pro**.
3. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
4. Stimmen Sie den AGB zu.
5. Tippen Sie unten auf **Registrieren**.
6. Geben Sie im ersten Feld Ihre Emailadresse ein.
7. Legen Sie im zweiten Feld ein Passwort an.
8. Geben Sie im dritten Feld Ihre Mobilfunknummer ein.



**HINWEIS:**

*Ohne Eingabe der Mobilfunknummer kann die Registrierung nicht abgeschlossen werden.*


9. Tippen Sie unten auf **Registrieren**.
10. Geben Sie Ihre Nutzerdaten ein (Geschlecht – Größe – Gewicht – Geburtsdatum). Tippen Sie nach jeder Eingabe unten auf **OK**.
11. Ihre Profilangaben werden noch einmal zusammengefasst angezeigt. Tippen Sie gegebenenfalls auf einen Wert, um ihn zu korrigieren.



12. Sollten alle Daten korrekt sein, tippen Sie unten auf **Weiter**.



13. Geben Sie unten Ihr Zielgewicht ein. Tippen Sie auf **Weiter**.  
14. Tippen Sie in der Geräte-Auswahl auf das Schaltfeld **Waage**.

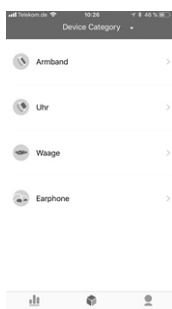

**HINWEIS:**

*Sollte sich der Kopplungsmodus der Waage in der Zwischenzeit ausgeschaltet haben, nehmen Sie die Batterien nochmal heraus und legen Sie sie erneut ein.*

15. Drehen Sie Ihre Waage um und scannen Sie den QR-Code, der sich auf der Unterseite befindet. Ihre Waage wird mit der App verbunden.  
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **JETZT WIFI KONFIGURIEREN / Wifi konfigurieren**.  
17. Stellen Sie sich kurz auf die Waage, bis folgendes Symbol im Display angezeigt wird:




18. Gehen Sie von der Waage herunter und tippen Sie in der App auf **JA / YES**.  
19. Tippen Sie im eingeblendeten Fenster auf **Blinkt**.  
20. Geben Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks ein. Tippen Sie dann auf **Konfigurieren**. Die Waage wird mit dem WLAN-Netzwerk verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.

**HINWEIS:**

Das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzwerks darf keine Sonderzeichen enthalten! Bei Passwörtern mit Sonderzeichen ist eine Verbindung nicht möglich. Passen Sie gegebenenfalls das WLAN-Passwort an.

21. Nach erfolgreicher Verbindung gelangen Sie zum Geräte-Tab der App.

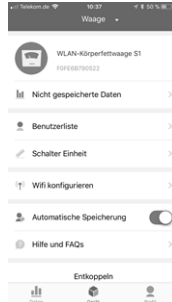

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Verwendung

### Beim Gebrauch mit mehreren Benutzern

**HINWEIS:**

Ersparen Sie sich das zeitkostende manuelle Wechseln der Benutzer. Die App kann anhand des Körpergewichts automatisch erkennen, welchem der Benutzer ein Messwert zugeordnet werden soll. Um diese Funktion möglichst fehlerfrei nutzen zu können, befolgen Sie die unteren Anweisungen bitte Schritt für Schritt!

**HINWEIS:**

Es kann mit unterschiedlichen Mobilgeräten auf die Waage zugegriffen werden, solange die Mobilgeräte mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind wie die Waage. Voraussetzung dafür ist die Installation der App **Zeroner Health Pro** auf den Mobilgeräten. Befolgen Sie dabei die Schritte 8-15 im Abschnitt **Inbetriebnahme > Ersteinrichtung**. Die WLAN-Verbindung der Waage muss nicht erneut konfiguriert werden.

1. Rufen Sie den Geräte-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Deaktivieren Sie die automatische Körpererkennung, indem Sie auf die Schaltfläche neben **Automatisches Abspeichern der Daten / Automatische Speicherung** tippen. Der Cursor befindet sich nun links.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Benutzerliste**.



#### HIWNEIS:

*Ihr Benutzername entspricht der angemeldeten Email-Adresse. Diese Daten werden in der Analyse standardmäßig beim Öffnen angezeigt.*

4. Fügen Sie weitere Benutzer hinzu, indem Sie auf Benutzer **hinzufügen** tippen.
5. Geben Sie im ersten Feld (**Anmerkung**) den Benutzernamen ein.
6. Geben Sie im zweiten Feld das Geschlecht des Benutzers ein, indem Sie auf die entsprechende Abbildung tippen.
7. Geben Sie im dritten Feld die Größe des Benutzers ein. Tippen Sie hierzu einfach auf das Feld und stellen Sie die Größe über das Scrollrad ein. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
8. Geben Sie im vierten Feld das Geburtsdatum des Benutzers ein. Tippen Sie hierzu einfach auf das Feld und stellen Sie das Datum über die Scrollräder ein. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
9. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie oben rechts auf **Bestätigen** tippen.
10. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Person, die die Waage nutzen wird.
11. Stellen Sie sich nun der Reihe nach auf die Waage und notieren Sie sich die Ergebnisse.
12. Tippen Sie im Geräte-Tab auf den Menüpunkt **Nicht gespeicherte Daten**.
13. Tippen Sie auf das gewünschte Messergebnis. Die Benutzerliste wird geöffnet.
14. Tippen Sie auf den Benutzer, zu dem das Messergebnis gehört.
15. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Benutzer / Messergebnisse.
16. Kehren Sie in den Geräte-Tab zurück und reaktivieren Sie die automatische Körpererkennung. Tippen Sie hierzu auf die Schaltfläche neben **Automatisches Abspeichern der Daten / Automatische Speicherung**. Der Cursor befindet sich nun wieder rechts.



#### HINWEIS:

*Bei Gewichtsabnahme kann es bei aktivierter Körpererkennung vorkommen, dass das Messergebnis einer anderen Person zugeordnet wird, wenn deren Gewicht relativ nahe unterhalb des Gewichts der messenden Person liegt. Falls das Messergebnis keiner Person zugeordnet wurde, finden Sie es im Ordner **Nicht gespeicherte Daten**.*

## Messen

1. Stellen Sie Ihre Waage auf einen flachen, festen und trockenen Untergrund.
2. Ziehen Sie Schuhe und Strümpfe aus. Achten Sie darauf, dass Ihre Fußsohlen trocken sind.

**HINWEIS:**

*Stellen Sie sich nicht auf die Waage, wenn Sie nass sind.*

3. Tippen Sie die Waage kurz an und warten Sie bis **00,00** im Display angezeigt wird.
4. Stellen Sie sich so auf die Waage, dass Ihre Füße die Elektroden bedecken. Nach erfolgreicher Messung blinkt das Ergebnis drei Mal. Die Daten werden in der App gespeichert (Geräte-Tab > Nicht gespeicherte Daten).



5. Verlassen Sie die Waage.
6. Wenn die automatische Körpererkennung (**Automatisches Abspeichern der Daten / Automatische Speicherung**) aktiviert ist, wird das Messergebnis direkt dem wahrscheinlichsten Benutzer zugeordnet.

**HINWEIS:**

*Sollte das Gewicht zweier oder mehr Nutzer dicht beieinander liegen, so empfiehlt es sich, vor der Messung des Gewichts dieser Personen, die automatische Körpererkennung zu deaktivieren, damit die Messungen nicht falsch zugeordnet werden können.*

Ist die Funktion deaktiviert, wird das Ergebnis im Ordner **Nicht gespeicherte Daten** abgelegt. Von dort kann es manuell einem Benutzer zugeordnet werden.

## Automatische Körpererkennung ein-/ausschalten

Die App kann anhand der Messdaten (alter und neuer) feststellen, um welchen der hinterlegten Benutzer es sich höchstwahrscheinlich handelt. Das neue Messergebnis wird dann automatisch dem Benutzer zugeordnet, die Messung wird nicht im Ordner **Nicht gespeicherte Daten abgelegt**. Standardmäßig ist die automatische Körpererkennung aktiviert.

1. Rufen Sie den Geräte-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Schalten Sie die Körpererkennung ein (Cursor rechts) oder aus (Cursor links), indem Sie auf die Schaltfläche neben **Automatisches Abspeichern der Daten / Automatische Speicherung** tippen.

## Messergebnis zuordnen



### HINWEIS:




Standardmäßig ist die automatische Körpererkennung (**Automatisches Abspeichern der Daten / Automatische Speicherung**) aktiviert. Die Messdaten werden dann automatisch dem wahrscheinlichsten Benutzer zugeordnet. In gewissen Fällen empfiehlt es sich jedoch, diese Funktion zu deaktivieren. Dann müssen die Messdaten manuell den richtigen Benutzern zugeordnet werden.

Die von Ihrer Waage an die App gesendeten Messergebnisse werden zuerst an einem allgemeinen Ort gespeichert. Die Zuordnung zu den jeweiligen Benutzern erfolgt manuell.

1. Rufen Sie den Geräte-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Nicht gespeicherte Daten**.

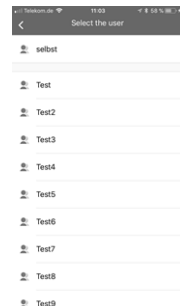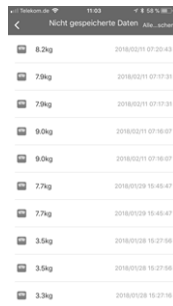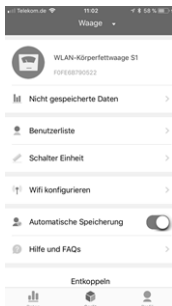

3. Tippen Sie auf das gewünschte Messergebnis. Diese sind nach Datum und Uhrzeit sortiert.
4. Tippen Sie dann auf den Benutzer, zu dem die Messdaten gehören. Die Messdaten werden aus der Liste entfernt.

## Gewichts-Analyse

Die gesammelten Daten werden in der Gewichtsanalyse für jeden Benutzer angezeigt.

1. Rufen Sie den Daten-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf das Feld Gewicht. Dort wird der Verlauf Ihrer Messungen bereits als Vorschau angezeigt.



3. Die Analyse wird in Form von Hintergrundfarben wiedergegeben. Die Bedeutung der Farben wird oberhalb der Liste erklärt. Scrollen Sie nach unten, um alle Datenpunkte aufzurufen.



#### HINWEIS:

*Tippen Sie auf das Fragezeichen neben den Analysepunkten (Android) oder auf den Analysepunkt (iOS), um näheres zur Erfassung und Bedeutung des Datenpunktes zu erfahren.*

4. Wechseln Sie den Benutzer, indem Sie oben auf den Pfeil neben den aktuellen Benutzer tippen (Android) oder zweimal schnell hintereinander auf den Benutzernamen tippen (iOS). Die Benutzerliste wird aufgeklappt. Tippen Sie dann auf den gewünschten Benutzer.

## Einstellungen

### Geräte-Einstellungen

#### Messeinheiten

Legen Sie fest, in welcher Messeinheit das Ergebnis auf dem Display Ihrer Waage angezeigt werden soll.

1. Rufen Sie den Geräte-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Schalter Einheit/Einheit-Wechsel / Schalter-Einheit**.
3. Stellen Sie über das Scrollrad die gewünschte Einheit ein.
4. Tippen Sie dann auf **BESTÄTIGEN / Speichern**.

## WLAN-Einstellungen




### HINWEIS:

Die Waage geht automatisch in den Pairing-Modus, sobald das zuvor eingerichtete Netzwerk nicht mehr verfügbar ist. Bitte konfigurieren Sie dann das WLAN neu (siehe Abschnitt **Inbetriebnahme > Ersteinrichtung**).

## App-Einstellungen

### Allgemein

1. Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:

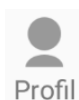

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie bearbeiten möchten.

<b>Passwort ändern</b>	1. Antippen. 2. Altes Passwort eingeben. 3. Neues Passwort eingeben. 4. <b>OK</b> tippen.
<b>Maßeinheit</b>	Zum Wechseln antippen
<b>Temperaturschalter</b>	Zum Wechseln antippen
<b>App aktualisieren</b>	Antippen
<b>Über</b>	Infos über die App aufrufen
<b>Überprüfen Sie den Nachrichten-Push-Dienst</b>	(Funktion für die Sportuhr NX-4399)
<b>DFU-Helfer</b>	(Funktion für die Sportuhr NX-4399)

### Mit anderen Diensten verknüpfen

Die in Ihrer App gesammelten Daten an andere Fitness- oder Gesundheits-Apps geschickt werden. Tippen Sie hierzu entweder auf die entsprechende Schaltfläche oder tippen Sie direkt auf den Menüpunkt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

### Abmelden

So melden Sie sich in der App ab:

1. Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf **ABMELDEN**. Sie werden in der App abgemeldet. Beim nächsten Öffnen der App müssen Sie sich wieder mit Ihrer Email-Adresse und Ihrem Passwort neu anmelden.

## Waage aus App entfernen

1. Rufen Sie den Geräte-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf **Abmelden**. Die Waage wird aus der App entfernt. Sie gelangen wieder zur **Gerätesuche**.

## Fehlermeldungen im Waage-Display



Maximalgewicht (155 kg) wurde überschritten



Batterien sind leer und müssen gegen neue ausgetauscht werden

## Weiteres Gerät mit App verbinden

Wenn Sie bereits im Besitz eines Benutzerkontos sind und dort bereits ein anderes Gerät (z.B. die Sportuhr NX-4399) gekoppelt haben, gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Rufen Sie den Geräte-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie oben auf den Pfeil neben dem Gerät.
3. Tippen Sie im Ausklapp-Menü auf Ein weiteres **Gerät hin...**
4. Tippen Sie in der Gerätesuche auf das entsprechende Gerät (z.B. auf **Waage**).
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



## Problemlösungen

### Das Display der Waage leuchtet nicht.

- Die Batterien sind leer. Setzen Sie neue Batterien ein.
- Die Batterien wurden falsch eingesetzt. Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie den Angaben zur Polarität im Batteriefach entsprechend wieder ein.
- Das Minimalgewicht (5 kg) wurde unterschritten.

### Warum kann das Körperfett nicht ermittelt werden?

- Ziehen Sie Schuhe und Socken aus, bevor Sie sich auf die Waage stellen. Ihre nackte Fußsohle muss Kontakt mit den Elektroden haben.
- Die Angaben zu Alter (6-99 Jahre) oder Größe (90-220 cm) liegen außerhalb des Normbereichs.
- Die Elektroden sind verschmutzt oder die Fußsohlen sind zu trocken. Reinigen Sie die Elektroden mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Warten Sie, bis das Messergebnis im Display drei Mal blinkt, bevor Sie die Waage verlassen.

### Es kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden.

- Versetzen Sie Ihre Waage in den WLAN-Verbindungs-Modus, indem Sie sich kurz draufstellen und gleich wieder absteigen. Warten Sie, bis das WLAN-Einrichtungssymbol im Display blinkt. Setzen Sie die Konfiguration dann fort.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist, in das Sie Ihre Waage einbinden möchten. Überprüfen Sie dann das eingegebene Passwort auf seine Richtigkeit.
- Ihre Waage kann nicht in ein 5-GHz-Netzwerk eingebunden werden.
- Die n Ihrem Router zugelassene Anzahl an Verbindungen wurde überschritten. Ändern Sie bitte die entsprechenden Router-Einstellungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung Ihres Routers.
- Das WLAN-Signal ist zu schwach. Positionieren Sie Waage und Mobilgerät näher am Router. Überprüfen Sie den WLAN-Empfang des Mobilgeräts.
- Die WLAN-AP-Isolation des Routers ist aktiviert. Deaktivieren Sie die Funktion. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung Ihres Routers.
- Ihr Router läuft im Dual-Band-Modus. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem 2,4-GHz-Band verbunden sind.
- Der Router befindet sich im Schutz-Modus. Ändern Sie die entsprechenden Router-Einstellungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung Ihres Routers.

### Die Messergebnisse sind ungenau.

- Nachdem die Waage bewegt wurde, muss sie sich kurz kalibrieren. Tippen Sie die Waage hierzu kurz an und warten Sie, bis **00,00** im Display angezeigt wird. Stellen Sie sich jetzt zum Wiegen auf die Waage.
- Stellen Sie die Waage auf einen flachen, festen Untergrund. Weicher oder unebener Untergrund beeinträchtigt das Messergebnis.

## Technische Daten

Stromversorgung		4 x Batterie Typ AAA (Micro)
Betriebszeit		bis zu 6 Monate
LCD-Display		8,8 cm (Diagonale)
Maximalgewicht		155 kg
Minimalgewicht		5 kg
Messschritte		0,1 kg
Messgenauigkeit	5-50 kg	± 0,1 kg
	50-100 kg	± 0,2 kg
	100-150 kg	± 0,3 kg
Analyse-Werte		Gewicht
		BMI
		Körperfett-Anteil
		Viszeralfett
		Wasser-Anteil
		Knochen-Anteil
		Empfohlene Kalorien-Tageszufuhr
Kompatibel mit Google Fit		✓
Kompatibel mit Apple Health		✓
WLAN	Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Sendefrequenz	2,41-2,484 GHz
	Sendeleistung	16 dBm
Elektroden		4
Betriebstemperatur		0°-40°C
Lagertemperatur		-20° bis 40°C
Maße		32 x 3,2 x 30 cm
Gewicht		1,2 kg

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV6 – 17.11.2021 – CR/LW/LZ/BS//MF

# Pèse-personne impédancemètre connecté

à 8 indicateurs, jusqu'à 155 kg

## Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouveau pèse-personne connecté.....</b>	<b>3</b>
Contenu .....	3
Accessoire en option (disponible séparément sur <a href="http://www.pearl.fr">www.pearl.fr</a> ).....	3
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>4</b>
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	5
Déclaration de conformité .....	5
<b>Description du produit.....</b>	<b>6</b>
Pèse-personne .....	6
Affichage à l'écran .....	6
<b>Mise en marche.....</b>	<b>7</b>
Insérer / Remplacer les piles .....	7
Installer l'application.....	7
Première configuration .....	7
Protection des données .....	9
<b>Utilisation.....</b>	<b>10</b>
Pour l'utilisation avec plusieurs utilisateurs.....	10
Mesure.....	11
Activer / Désactiver la reconnaissance automatique de l'utilisateur .....	12
Assigner un résultat .....	12
Analyse du poids .....	13
Réglages.....	14
Réglages de l'appareil.....	14
Unités de mesure .....	14
Réglages wifi.....	14
Réglages de l'application.....	14
Général.....	14
Connecter à d'autres services.....	15
Déconnexion .....	15
Supprimer le pèse-personne de l'application.....	15
Messages d'erreur à l'écran du pèse-personne.....	15
<b>Connecter un autre appareil à l'application.....</b>	<b>16</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>17</b>

# Votre nouveau pèse-personne connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pèse-personne connecté. Connectez le pèse-personne à l'application et générez une analyse avec explications sur l'IMC, l'indice de masse grasse (IMG), la masse musculaire, la teneur en eau, la masse osseuse, le taux de graisse viscérale et le métabolisme. Le pèse-personne peut être utilisé par toute la famille sans devoir passer sans cesse d'un utilisateur à l'autre dans l'application. En effet, le pèse-personne dispose d'une reconnaissance automatique de l'utilisateur qui lui permet d'attribuer automatiquement les résultats des mesures à l'utilisateur le plus probable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Pèse-personne connecté
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 4 piles AAA
- Appareil mobile Android 4.3 et versions supérieures / iOS 8.0 et versions supérieures
- Application recommandée : Vous avez la possibilité, pour ce produit, d'utiliser une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **Zeroner Healt Pro** sur Google Play Store (Android), ou sur l'App Store (iOS).

**Accessoire en option** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr))

NX4399 : Montre de sport avec récepteur GPS intégré

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit sert à prendre des mesures générales du poids et de la masse grasseuse corporelle. Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
- Si vous soumettez le produit à une température de fonctionnement (0 à 40 °C) ou de stockage (-2° à 40 °C) non autorisée, les mesures peuvent être faussées.
- N'utilisez pas ce produit sur une surface humide ou glissante. Vous risquez de glisser ou de chuter.
- N'utilisez pas le pèse-personne s'il est mouillé. Essuyez-vous bien après le bain ou la douche, notamment les plantes des pieds, avant de monter sur le pèse-personne.
- Ne vous placez pas au bord du pèse-personne et ne sautez pas sur le pèse-personne. Le pèse-personne pourrait se renverser. Risque de chute et de blessures !
- Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et sèche.
- Avant de vous peser, retirez vos chaussures et vos chaussettes. Placez bien vos pieds sur les électrodes et gardez l'équilibre.
- N'utilisez pas le pèse-personne sur une surface moelleuse comme, par exemple, un tapis, une serviette de bains, etc.

- Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre appareil médical d'implant ne doivent pas utiliser ce pèse-personne.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-4436 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*


Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

### Pèse-personne

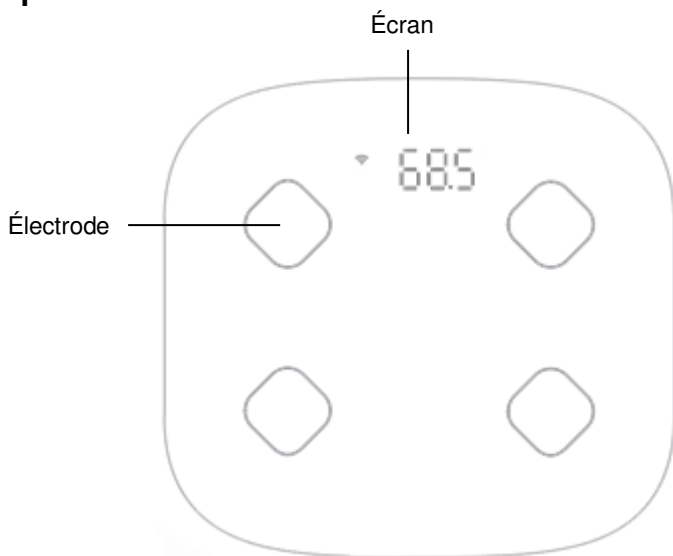

### Affichage à l'écran



Le réseau est en cours de configuration



Échec de la configuration wifi



Connexion wifi



Configuration réseau établie

## Mise en marche

### Insérer / Remplacer les piles

1. Retournez le pèse-personne et ouvrez le compartiment à piles en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Le cas échéant, retirez les piles usagées.
3. Insérez quatre nouvelles piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles !
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles et poussez-le dans le sens opposé de la flèche.

### Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **Zeroner Health Pro**. Recherchez-la dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

### Première configuration



**NOTE :**

*Si vous disposez déjà d'un compte d'utilisateur (par ex., parce que vous possédez la montre sport GPS NX4399), veuillez procéder comme expliqué au chapitre **Connecter un autre appareil à l'application**.*

1. Connectez votre appareil mobile au réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel vous souhaitez connecter votre pèse-personne.



**NOTE :**

*Votre pèse-personne ne peut pas être connecté à un réseau de 5 GHz.*

2. Ouvrez l'application **Zeroner Health Pro**.
3. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
4. Acceptez les conditions générales.
5. Appuyez en bas de l'écran sur **Inscription**.
6. Dans le premier champ, saisissez votre adresse e-mail.
7. Dans le deuxième champ, saisissez un mot de passe.
8. Saisissez votre numéro de téléphone mobile dans le troisième champ.



**NOTE :**

*L'inscription ne peut pas être finalisée sans la saisie du numéro de téléphone.*


9. Appuyez en bas de l'écran sur **Inscription**.
10. Saisissez vos données d'utilisateur (sexe – taille – poids – date de naissance). Après chaque saisie, appuyez sur **OK**.
11. Les données de votre profil vous sont à nouveau résumées. Si besoin, appuyez sur une valeur pour la corriger.

12. Appuyez en bas de l'écran sur **Suivant**.



13. Saisissez votre objectif de poids en bas de l'écran. Appuyez sur **Suivant**.

14. Dans la sélection d'appareils, appuyez sur la touche **Pèse-personne**.

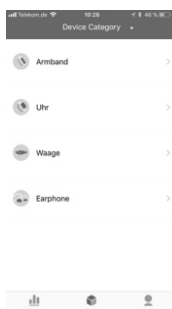

**NOTE :**

*Si le mode Appariement du pèse-personne se désactive entre-temps, retirez les piles, puis réinsérez-les à nouveau.*

15. Retournez votre pèse-personne et scannez le code QR situé sur la partie inférieure. Votre pèse-personne sera connecté à l'application.

16. Dans le message de réussite, appuyez sur **CONFIGURER LE RESEAU INTERNET SANS FIL MAINTENANT / Configurer le réseau Internet sans fil**.

17. Montez brièvement sur le pèse-personne jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse à l'écran :



18. Descendez du pèse-personne et appuyez sur **OUI / YES** dans l'application.


19. Dans la fenêtre qui s'affiche, appuyez sur **Clignote**.

20. Saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil. Appuyez sur **Configurer**. Le pèse-personne est en cours de connexion au réseau Internet sans fil, cela peut prendre quelques instants.

**NOTE :**

*Le mot de passe du réseau Internet sans fil choisi ne doit pas contenir de caractères spéciaux ! Une connexion avec des mots de passe contenant des caractères spéciaux n'est pas possible. Si besoin, adaptez le mot de passe wifi.*

21. Une fois la connexion réussie, vous accédez à l'onglet Appareils de l'application.

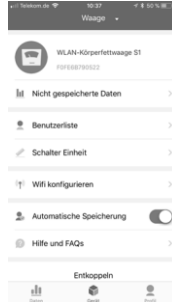

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimer toutes les données.
- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimer l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Utilisation

### Pour l'utilisation avec plusieurs utilisateurs



**NOTE :**

Évitez le changement d'utilisateur manuel qui s'avère chronophage. Selon le poids, l'application reconnaît automatiquement à quel utilisateur attribuer une mesure. Afin d'utiliser au mieux cette fonction, veuillez suivre les instructions ci-dessous à la lettre !



**NOTE :**

Vous pouvez accéder au pèse-personne à partir de différents appareils mobiles dans la mesure où ils sont connectés au même réseau Internet sans fil que le pèse-personne. L'installation de l'application **Zeroner Health Pro** sur les appareils mobiles est nécessaire. Pour cela, suivez les étapes 8 à 15 du paragraphe **Mise en marche > Première installation**. La connexion wifi du pèse-personne n'a pas besoin d'être reconfigurée.

1. Ouvrez l'onglet Appareils en appuyant sur le symbole suivant, situé en bas de l'écran :



2. Désactivez la reconnaissance automatique de l'utilisateur en appuyant sur la touche **Sauvegarde automatique des données / Enregistrement automatique**. Le curseur se trouve alors à gauche.
3. Appuyez sur l'élément de menu **Liste des utilisateurs**.



**NOTE :**

Votre nom d'utilisateur correspond à l'adresse mail que vous avez enregistrée. Ces données s'affichent par défaut dans l'analyse lors de l'ouverture.

4. Ajoutez d'autres utilisateurs en appuyant sur **Ajouter un utilisateur**.
5. Dans le premier champ **Remarque**, saisissez le nom d'utilisateur.
6. Dans le deuxième champ, saisissez le sexe de l'utilisateur en appuyant sur la deuxième illustration.
7. Saisissez la taille de l'utilisateur dans le troisième champ. Appuyez simplement sur le champ et réglez la taille à l'aide de la molette. Appuyez ensuite sur **Confirmer**.
8. Saisissez la date de naissance de l'utilisateur dans le quatrième champ. Appuyez simplement sur le champ et réglez la date à l'aide de la molette. Appuyez ensuite sur **Confirmer**.
9. Sauvegardez les réglages en appuyant en haut à droite de l'écran sur **Confirmer**.
10. Répéter le processus pour chaque personne qui utilisera le pèse-personne.
11. Placez-vous ensuite dans l'ordre sur le pèse-personne et notez les résultats.
12. Appuyez sur l'élément de menu **Données non enregistrées**, dans l'onglet Appareils.
13. Appuyez sur le résultat souhaité. La liste des utilisateurs s'ouvre.

14. Appuyez sur l'utilisateur auquel appartient le résultat.
15. Répétez cette opération pour chaque utilisateur / résultat.
16. Retournez dans l'onglet Appareils et réactivez la reconnaissance automatique de l'utilisateur. Pour cela, appuyez sur la touche **Sauvegarde automatique des données / Enregistrement automatique**. Le curseur se trouve alors à droite.



**NOTE :**

*Lorsque la reconnaissance automatique de l'utilisateur est activée et en cas de perte de poids, il peut arriver que le résultat soit attribué à une autre personne dont le poids est proche de celui de la personne qui vient de se peser. Si le résultat n'a pas été attribué, vous le trouverez dans le dossier **Données non enregistrées**.*

## Mesure

1. Placez toujours le pèse-personne sur une surface plane, solide et sèche.
2. Retirez vos chaussures et chaussettes. Veillez à avoir les plantes des pieds bien sèches.



**NOTE :**

*Ne montez pas sur la balance si vous êtes mouillé.*

3. Appuyez brièvement sur le pèse-personne et attendez que l'écran affiche **00,00**.
4. Montez sur la balance de façon à ce que vos pieds couvrent les électrodes. Lorsque la mesure a été prise avec succès, le résultat clignote trois fois. Les données sont enregistrées dans l'application (Onglet Appareils > Données non enregistrées).



5. Descendez du pèse-personne.
6. Lorsque la reconnaissance automatique est activée (**Sauvegarde automatique des données / Enregistrement automatique**), le résultat est attribué directement à l'utilisateur le plus probable.



**NOTE :**

*Si le poids de deux ou plusieurs personnes est très proche, il est recommandé de désactiver la reconnaissance automatique de l'utilisateur pour éviter une attribution erronée des résultats.*

Si la fonction est désactivée, le résultat sera conservé dans **Données non enregistrées**. De là, il peut être attribué manuellement à un utilisateur.

## Activer / Désactiver la reconnaissance automatique de l'utilisateur

L'application peut définir de quel utilisateur il s'agit probablement en se basant sur les mesures (anciennes et actuelles). Le nouveau résultat est attribué automatiquement à l'utilisateur et n'est pas enregistré dans le dossier **Données non enregistrées**. La reconnaissance automatique de l'utilisateur est activée par défaut.

1. Affichez l'onglet Appareils en appuyant sur le symbole suivant, situé en bas de l'écran :



2. Activez ( curseur à droite) ou désactivez ( curseur à gauche) la reconnaissance automatique de l'utilisateur en appuyant sur la touche **Sauvegarde automatique des données / Enregistrement automatique**.

## Assigner un résultat



**NOTE :**




Par défaut, la reconnaissance automatique est activée (**Sauvegarde automatique des données / Enregistrement automatique**). Les données mesurées sont alors attribuées automatiquement à l'utilisateur le plus probable. Dans certains cas, il convient cependant de désactiver cette fonction. Les résultats doivent alors être attribués manuellement au bon utilisateur.

Les résultats envoyés à l'application par votre pèse-personne sont d'abord enregistrés dans un emplacement général. L'attribution à chaque utilisateur se fait manuellement.

1. Affichez l'onglet Appareils en appuyant sur le symbole suivant, situé en bas de l'écran :



2. Appuyez sur l'élément de menu **Données non enregistrées**.

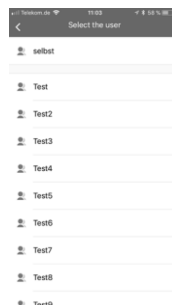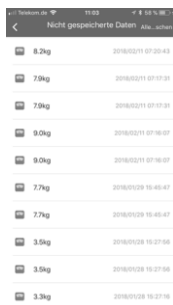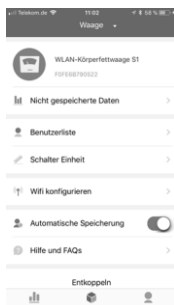

- Appuyez sur le résultat souhaité. Ils sont classés par date et heure.
- Appuyez ensuite sur l'utilisateur auquel appartient le résultat. Les données sont alors retirées de la liste.

## Analyse du poids

Les données collectées s'affichent dans le tableau d'analyse de poids pour chaque utilisateur.

- Affichez l'onglet Données en appuyant sur le symbole suivant, situé en bas de l'écran :



- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur le champ Poids. L'historique de vos mesures s'affiche déjà en aperçu.



- L'analyse est indiquée par des couleurs de fond. La signification des couleurs est expliquée au-dessus de la liste. Faites défiler vers le bas pour voir tous les points de données.



### NOTE :

Appuyez sur le point d'interrogation à côté du point d'analyse (Android) ou sur le point d'analyse (iOS) pour en savoir plus sur la collecte et la signification du point de données.

- Changez d'utilisateur en appuyant sur la flèche située en haut de l'écran, à côté de l'utilisateur actuel (Android) ou en appuyant deux fois de suite brièvement sur le nom d'utilisateur (iOS). La liste des utilisateurs s'ouvre. Appuyez ensuite sur l'utilisateur souhaité.



## Réglages

### Réglages de l'appareil

#### Unités de mesure

Déterminez l'unité de mesure de la mesure qui s'affiche à l'écran du pèse-personne.

1. Affichez l'onglet Appareils en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur l'élément de menu **Unité de l'interrupteur / Modifier l'unité.**
3. Réglez l'unité désirée à l'aide de la molette.
4. Appuyez ensuite sur **CONFIRMER / Sauvegarder.**

#### Réglages wifi




**NOTE :**

*Le pèse-personne passe automatiquement en mode Appariement dès que le réseau installé n'est plus disponible. Veuillez alors reconfigurer le réseau Internet sans fil (voir paragraphe **Mise en marche > Première configuration**).*

### Réglages de l'application

#### Général

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant, situé en bas de l'écran :

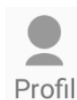

2. Appuyez sur l'élément de menu **Réglages.**
3. Appuyez sur le réglage que vous souhaitez modifier.

<b>Modifier le mot de passe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer.</li> <li>2. Saisir l'ancien mot de passe.</li> <li>3. Saisir le nouveau mot de passe.</li> <li>4. Appuyer sur OK.</li> </ol>
<b>Unité de mesure</b>	Appuyer pour modifier
<b>Touche de température</b>	Appuyer pour modifier
<b>Mettre à jour l'application</b>	Appuyer
<b>A propos</b>	Afficher les informations sur l'application
<b>Vérifier le service de notifications push</b>	(Fonction pour la montre sport NX4399)
<b>Assistant DFU</b>	(Fonction pour la montre sport NX4399)

## Connecter à d'autres services

Les données collectées dans votre application peuvent être envoyées à d'autres applications fitness ou santé. Pour cela, appuyez sur la touche correspondante ou directement sur l'élément de menu et suivez les instructions affichées à l'écran.

## Déconnexion

Voici comment se déconnecter de l'application :

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant, situé en bas de l'écran :



2. Faites défiler la liste complètement vers le bas et appuyez sur **DÉCONNECTER**. Vous serez alors déconnecté de l'application. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application, vous devrez vous connecter avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

## Supprimer le pèse-personne de l'application

1. Affichez l'onglet Appareils en appuyant sur le symbole suivant :



2. Faites défiler la liste complètement vers le bas et appuyez sur **Déconnecter**. Le pèse-personne est alors supprimé de l'application. Vous retournez à la **Recherche d'appareils**.

## Messages d'erreur à l'écran du pèse-personne



Le poids maximum (155 kg) a été dépassé.



Les piles sont vides et doivent être remplacées par de nouvelles piles.

## Connecter un autre appareil à l'application

Si vous possédez déjà un compte d'utilisateur et qu'un autre appareil y est déjà apparié (par ex. la montre sport NX4399), veuillez procéder comme suit :

1. Affichez l'onglet Appareils en appuyant sur le symbole suivant, situé en bas de l'écran :



2. Appuyez sur la flèche située en haut de l'écran, à côté de l'appareil.
3. Dans le menu déroulant, appuyez sur **Ajouter une app...**
4. Dans la recherche d'appareil, appuyez sur l'appareil correspondant (par ex. **pèse-personne**).
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Dépannage

### L'écran du pèse-personne reste vierge.

- Les piles sont vides. Changez les piles.
- Les piles n'ont pas été insérées correctement. Retirez les piles et insérez-les à nouveau en respectant la polarité.
- Le poids minimum de 5 kg n'est pas atteint.

### Pourquoi la masse grasseuse ne peut-elle pas être déterminée ?

- Retirez vos chaussures et chaussettes avant de monter sur le pèse-personne. La plante de vos pieds nus doit être en contact avec les électrodes.
- Les indications d'âge (6-99 ans) ou de taille (90-220 cm) ne sont pas dans les normes.
- Les électrodes sont encrassées ou vos plantes de pied ne sont pas sèches. Nettoyez les électrodes avec un chiffon doux, légèrement humide.
- Attendez que le résultat de la mesure clignote trois fois à l'écran avant de descendre du pèse-personne.

### La connexion wifi ne peut pas être établie.

- Mettez votre pèse-personne en mode Connexion wifi en montant brièvement dessus et en redescendant aussitôt. Attendez que le symbole de connexion wifi clignote à l'écran. Procédez ensuite à la configuration.
- Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau 2,4 GHz auquel vous souhaitez ajouter votre pèse-personne. Vérifiez ensuite si le mot de passe est juste.
- Votre pèse-personne ne peut pas être connecté à un réseau 5 GHz.
- Le nombre autorisé de connexion à votre routeur a été dépassé. Veuillez modifier les réglages du routeur en conséquence. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre routeur.
- Le signal wifi est trop faible. Positionnez le pèse-personne et l'appareil mobile plus près du routeur. Vérifiez la réception wifi de l'appareil mobile.
- L'isolement du PA wifi du routeur est activé. Désactivez la fonction. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre routeur.
- Votre routeur fonctionne en mode dual band. Assurez-vous d'être connecté à la bande 2,4 GHz.
- Le routeur se trouve en mode Protection. Modifiez les réglages correspondants du routeur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre routeur.

### Les résultats de mesure sont imprécis.

- Après que le pèse-personne ait été déplacé, il doit se calibrer brièvement. Appuyez brièvement sur le pèse-personne et attendez que l'écran affiche **00,00**. Montez sur la balance pour vous peser.
- Placez le pèse-personne sur une surface plane et solide. Une surface inégale ou moelleuse fausse le résultat de la mesure.

## Caractéristiques techniques

Alimentation		4 piles AAA
Autonomie		Jusqu'à 6 mois
Écran LCD		8,8 cm (diagonale)
Poids maximum supporté		155 kg
Poids minimum		5 kg
Intervalles de mesure		0,1 kg
Précision de la mesure	5-50 kg	± 0,1 kg
	50-100 kg	± 0,2 kg
	100-150 kg	±0,3 kg
Valeurs d'analyse		Poids
		IMC
		Masse grasseuse corporelle
		Graisse viscérale
		Masse hydrique
		Masse osseuse
		Métabolisme de base
Compatible avec GoogleFit		✓
Compatible avec Apple Health		✓
Réseau Internet sans fil	Par défaut	IEEE 802.11b/g/n
	Fréquence d'émission	2,41-2,484 GHz
	Puissance d'émission	16 dBm
Électrodes		4
Température de fonctionnement		0°C-40°C
Température de stockage		-20°C à 40°C
Dimensions		32 x 3,2 x 30 cm
Poids		1,2 kg



