

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser 7in1 Körperanalysewaage.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
die 7in1 Körperanalysewaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Körperanalysewaage mit Bluetooth
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3x Batterien Typ AAA, 1,5 V (z. B. PX-1565)
- Mobilgerät mit Bluetooth 4.0

Empfohlene App:

Zum Betrieb können Sie eine App verwenden, die eine
Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät
herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **FeelFit-
Health-Fitness-Tool** aus dem Google Play Store (Android), oder
dem App Store (iOS). Falls Sie ein Fitness-Armband besitzen,
empfehlen wir die kostenlose App **VeryfitPro** aus dem Google
Play Store (Android) oder dem App Store (iOS).

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterien Typ AAA, 1,5 V DC	
Messungen	Gewicht, Körperfett, Viszeralfett, Wasser, Knochen, Muskeln (Protein)	
Maximalgewicht	180 kg	
Bluetooth	Version	4.0
	Frequenz- bereich	2.040 – 2.483,5 MHz
	Max. Sende- leistung	< 10 dBm
Abmessungen	260 x 260 x 23 mm	
Gewicht	1013 g	

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage und
legen Sie drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei
auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
Schließen Sie das Batteriefach wieder.

2. Stellen Sie die Waage auf einen flachen, festen Untergrund.
3. Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App Store
(iOS) nach der App **FeelFit-Health Fitness Tool**.



HINWEIS:

Falls Sie ein Fitness-Armband mit der App **VeryfitPro**
haben, können Sie Ihre Messungen auch in dieser App
speichern.

Verwendung ohne App

1. Tippen Sie mit dem linken Fuß auf die Waage, um sie
einzuschalten. Die Waage kalkuliert nun.
2. Stellen Sie sich barfuß auf die Waage sobald sie **0,00 kg** zeigt.
3. Bleiben Sie ruhig, mit den Füßen auf den silbernen
Messpunkten, stehen, die Waage misst nun Ihr Gewicht und
analysiert Ihren Körper.



HINWEIS:

Auf der Waage wird nur das Gewicht in kg/lb/st.
angezeigt. Für die Anzeige **Gesamtanalyse** und andere
Gewichtseinheiten benötigen Sie die App.

Verwendung mit App

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung
zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir
empfehlen hierzu die kostenlose App **FeelFit-Health-Fitness-
Tool** oder mit einem Fitness-Armband die kostenlose App
VeryfitPro. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder
im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



HINWEIS:

Die Darstellung der App kann je nach Mobilgeräte-
Version variieren.

Verwendung mit der App **FeelFit-Health-Fitness-Tool**




HINWEIS:

Ihr Mobilgerät sollte sich in der Nähe der Waage befinden,
um den Datenaustausch über Bluetooth zu ermöglichen.

1. Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät. Erlauben Sie
gegebenenfalls, dass die App Ihnen Mitteilungen senden darf.

2. Wählen Sie die gewünschte Gewichtseinheit in der App.
3. Wählen Sie die gewünschte Höheneinheit in der App.
4. Registrieren Sie sich unter **FeelFit beitreten** und stimmen Sie
den Datenschutzregeln zu oder melden Sie sich an, wenn Sie
bereits registriert sind. Bei der Registrierung sind folgende
Schritte zu beachten:

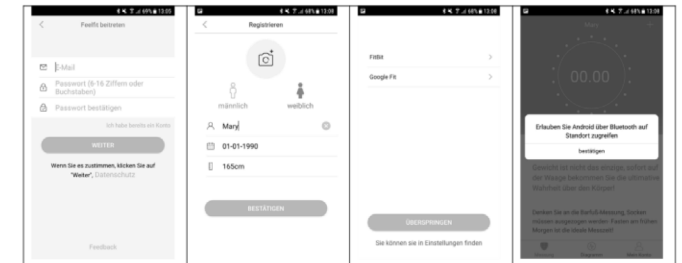

1. Geben Sie im ersten Feld Ihre Email-Adresse ein.
2. Geben Sie im zweiten Feld Ihr Passwort ein, das aus
mindestens 6 Ziffern und Buchstaben bestehen muss.
Bestätigen Sie das Passwort im dritten Feld.
3. Legen Sie in der App Ihr Geschlecht fest und geben Sie Ihren
Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Größe ein.
4. Sie können Ihre App mit Ihrem FitBit-Konto oder Ihrem
GoogleFit-Konto synchronisieren oder diesen Schritt
überspringen.
5. Erlauben Sie der App den Zugriff über Bluetooth auf Ihren
Standort zuzugreifen, indem Sie auf **Bestätigen** tippen.
5. Lassen Sie die Verbindung mit Bluetooth und GPS zu und
schalten Sie an Ihrem Mobilgerät sowohl Bluetooth, als auch
GPS ein. Ihre Waage verbindet sich automatisch mit der App.




HINWEIS:

Alle vorherigen Messungen werden angezeigt und
können mit dem Nutzer verbunden werden.

6. Tippen Sie mit dem linken Fuß auf die Waage, um sie
einzuschalten. Die Waage kalkuliert nun.
7. Stellen Sie sich barfuß auf die Waage sobald sie **0,00 kg** zeigt.
8. Bleiben Sie ruhig, mit den Füßen auf den silbernen
Messpunkten, stehen, die Waage misst nun Ihr Gewicht und
analysiert Ihren Körper.

Messung

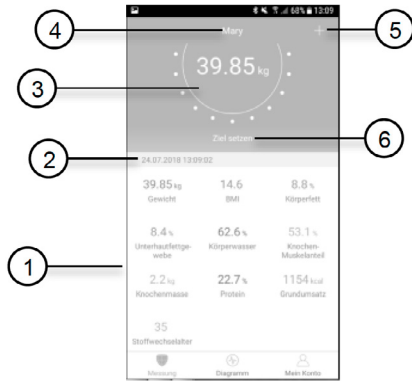


- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 Messungen | 4 Nutzer |
| 2 Datum der Messung | 5 Manuelle Aufnahme |
| 3 Gewichtsanzeige | 6 Zielgewicht |

Im Bereich **Messung** sehen Sie die Daten ein, die die Waage an die App sendet. Der Nutzer kann über **Mein Konto** gewechselt werden (siehe Kapitel **Mein Konto**) und wird im Bereich **Messung** oben angezeigt. Das aktuelle Gewicht wird Ihnen unter dem Datum angezeigt und Sie können ein Zielgewicht setzen.

Zielgewicht

Legen Sie in der App ein Zielgewicht fest.

1. Wiegen Sie sich.
2. Tippen Sie auf der Hauptseite der App neben der Gewichtsanzeige auf **Ziel setzen**. Die Zielgewichtseinstellungen werden geöffnet.
3. Stellen Sie das gewünschte Zielgewicht ein, indem Sie auf einen Punkt der Messlatte tippen und diese zur Seite ziehen, bis über dem Pfeil das gewünschte Zielgewicht angezeigt wird.

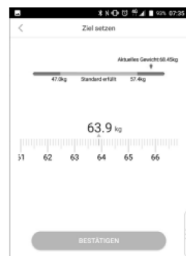


4. Tippen Sie unten auf **bestätigen**. Die Einstellung wird gespeichert.

Diagramm

Hier wird Ihnen jeweils ein Diagramm angezeigt zu jeder Analyseeinheit. Sie können ein wöchentliches, monatliches oder jährliches Diagramm anzeigen lassen. Im Bereich **Historische Daten** sehen Sie alle Messungen eines Tages ein.


Mein Konto

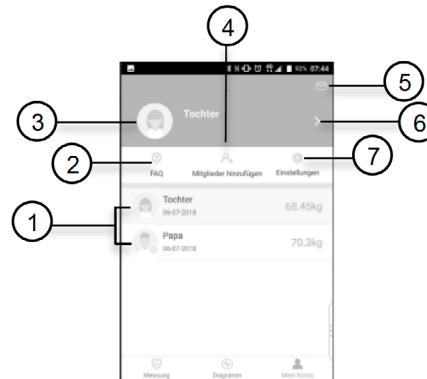

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 Alle Nutzer | 5 Nachrichten |
| 2 FAQ | 6 Profil bearbeiten |
| 3 Aktueller Nutzer | 7 Einstellungen |
| 4 Nutzer hinzufügen | |

Nutzer löschen

Ziehen Sie den gewünschten Nutzer nach links und wählen Sie **löschen**, um den Nutzer und seine Dateien zu löschen.

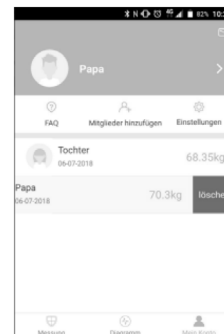

Bestätigen Sie den Löschvorgang, um ihn abzuschließen.

Einstellungen

Themenfarben	Farbe ändern
Ziel setzen	Wunschgewicht einstellen
Gewichteinheiten	kg, lb, st
Messen-Ton	ein / aus
Google Fit	mit Google Fit – App verbinden
FitBit	mit FitBit verbinden
Meine Geräte	mit Waagen verbinden
Wiegen-Erinnerung	Wecker stellen
Passwort	Private Daten mit Passwort schützen ein / aus
Sprachen	Englisch, Hochchinesisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Tschechisch, Italienisch, Türkisch
Feedback	Feedback schreiben
Info	Aktuelle Version der App

Verwendung mit Fitness-Armband und VeryfitPro




HINWEIS:


Ihr Mobilgerät sollte sich in der Nähe der Waage befinden, um den Datenaustausch über Bluetooth zu ermöglichen.

1. Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät. Erlauben Sie gegebenenfalls, dass die App Ihnen Mitteilungen senden darf.
2. Verbinden Sie Ihr Fitness-Armband mit der VeryfitPro App, wie in der Bedienungsanleitung des Fitness-Armbandes beschrieben.
3. Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgerätes eingeschaltet ist.
4. Tippen Sie in der App auf das +, und anschließend auf das -Symbol.
5. Tippen Sie mit dem linken Fuß auf die Waage, um sie einzuschalten. Die Waage kalkuliert nun.
6. Wählen Sie unter der Gerätekopplung die Waage aus.
7. Wählen Sie **Messen anklicken**, um die folgende Messung Ihrer Waage in der App einsehen zu können.
8. Stellen Sie sich barfuß auf die Waage sobald sie **0,00 kg** zeigt.
9. Bleiben Sie ruhig, mit den Füßen auf den silbernen Messpunkten, stehen, die Waage misst nun Ihr Gewicht und analysiert Ihren Körper.

Gewichtskontrolle

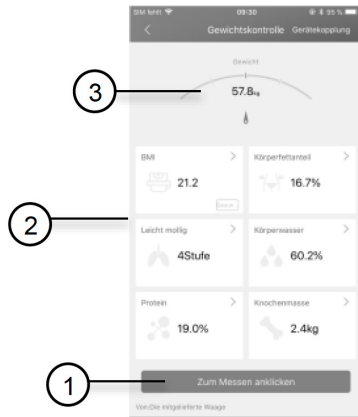

Klicken Sie auf eines der Gewichtskontroll-Felder, um die Daten anzuzeigen.

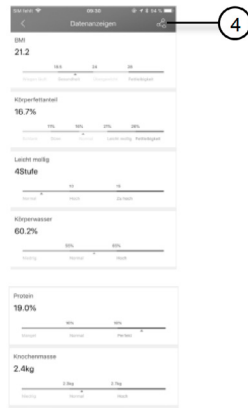

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1 Messen anklicken | 3 Gewicht |
| 2 Datenanzeige | 4 Teilen |

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Waage auf eine stabile, ebene Fläche, um die bestmögliche Präzision und Wiederholung zu ermöglichen.
- Wiegen Sie sich immer am selben Ort. Ein unebener Untergrund kann die Messungen beeinflussen.
- Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel (falls notwendig).
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und Hitzequellen.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- Lagern Sie die Waage in einer horizontalen Position.

- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Waage über längeren Zeitraum nicht verwenden.
- **WARNUNG:** Das Gerät lässt elektrischen Strom durch den Benutzer fließen, um Messungen durchzuführen. Das Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten verwendet werden. Lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Produktes von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie schwanger sind oder schwanger sein könnten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4501-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4501 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance impédancemètre connectée 7 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Balance impédancemètre avec fonction bluetooth
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles AAA 1,5 V
- Appareil mobile avec connexion bluetooth 4.0

Application recommandée :

Vous avez la possibilité, pour ce produit, d'utiliser une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **FeelFit-Health-Fitness-Tool** sur Google Play Store (Android), ou sur l'App Store (iOS). Si vous possédez un bracelet fitness, nous vous recommandons l'application gratuite **VeryFitPro** sur Google Play Store (Android), ou sur l'App Store (iOS).

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA, 1,5 V	
Mesures	Masse, graisse corporelle, graisse viscérale, eau, os, muscles, protéines	
Poids maximum supporté	180 kg	
Bluetooth	Version	4.0
	Plage de fréquences	2.040 – 2483.5 MHz
	Puissance d'émission max.	< 10 dBm
Dimensions	260 x 260 x 23 mm	
Poids	1013 g	

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la balance et insérez trois piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.
2. Placez la balance sur une surface plane et fixe.

3. Dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS), recherchez l'application **FeelFit-Health-Fitness-Tool**.



NOTE :

*Si vous possédez un bracelet fitness avec l'application **VeryFitPro**, vous pouvez enregistrer vos mesures dans cette application également.*

Utilisation sans application

1. Appuyez votre pied gauche sur la balance pour l'allumer. La balance se met à calculer.
2. Tenez-vous pieds nus sur la balance dès qu'elle affiche **0,00 kg**.
3. Restez immobile et calme, les pieds sur les points de mesure argentés. La balance mesure alors votre poids et analyse votre corps.



NOTE :

Seul le poids en kg/lb/st. est affiché sur la balance. Pour l'affichage d'une analyse globale et pour d'autres unités de mesure, vous avez besoin d'une application.

Utilisation avec application

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **FeelFit-Health-Fitness-Tool** ou, pour un bracelet fitness, l'application gratuite **VeryFitPro**. Recherchez-la dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



NOTE :

L'affichage de l'application peut varier selon la version de l'appareil mobile.

Utilisation avec l'application **FeelFit-Health-Fitness-Tool**




NOTE :

Votre appareil mobile doit se trouver à proximité de la balance pour permettre l'échange de données par connexion bluetooth.

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile. Si nécessaire, autorisez l'application à vous envoyer des notifications.

2. Sélectionnez dans l'application l'unité de mesure de votre choix pour le poids.
3. Sélectionnez dans l'application l'unité de mesure de votre choix pour la taille.
4. Inscrivez-vous dans **Adhérer à Feelfit** et acceptez la politique de confidentialité ou connectez-vous si vous êtes déjà inscrit. Lors de l'inscription, vous devez respecter les étapes suivantes :

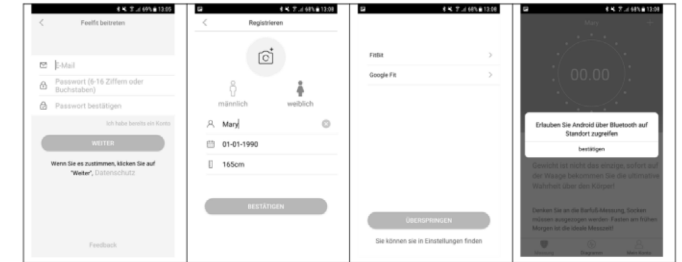

1. Dans le premier champ, saisissez votre adresse e-mail.
2. Dans le deuxième champ, saisissez votre mot de passe, qui doit comporter au moins 6 chiffres et lettres. Dans le troisième champ, confirmez le mot de passe.
3. Définissez votre sexe dans l'application et saisissez votre nom, votre date de naissance et votre taille.
4. Vous pouvez synchroniser votre application avec votre compte FitBit ou votre compte GoogleFit, ou vous pouvez sauter cette étape.
5. Autorisez l'application à avoir accès par bluetooth à votre position en appuyant sur **Confirmer**.
5. Acceptez la connexion par bluetooth et GPS et activez les fonctions bluetooth et GPS sur votre appareil mobile. La balance se connecte automatiquement à l'application.




NOTE :

Toutes les mesures précédentes sont affichées et peuvent être connectées à l'utilisateur.

6. Appuyez votre pied gauche sur la balance pour l'allumer. La balance se met à calculer.
7. Tenez-vous pieds nus sur la balance dès qu'elle affiche **0,00 kg**.
8. Restez immobile et calme, les pieds sur les points de mesure argentés. La balance mesure alors votre poids et analyse votre corps.

Mesure

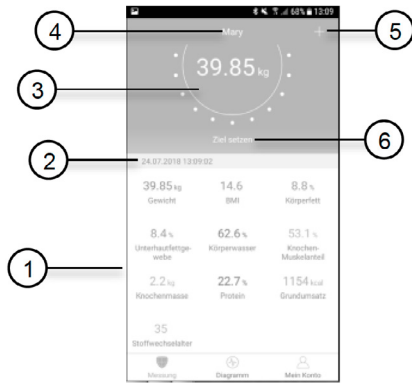


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Mesures | 4 Utilisateur |
| 2 Date de la mesure | 5 Enregistrement manuel |
| 3 Affichage du poids | 6 Poids cible |

Dans la rubrique **Mesure**, vous pouvez consulter les données que la balance a envoyées à l'application. L'utilisateur peut être changé dans **Mon compte** (voir la section **Mon compte**) et est affiché en haut dans la rubrique **Mesure**. Le poids actuel est affiché sous la date et vous pouvez vous fixer un poids cible.

Poids cible

Déterminez un poids cible dans l'application.

1. Pesez-vous.
2. Sur la page principale de l'application, appuyez sur **Se fixer un objectif** à côté de l'affichage du poids. Les paramètres du poids cible s'affichent.
3. Paramétrez le poids cible de votre choix en appuyant sur un point de la barre et en faisant glisser celle-ci latéralement jusqu'à ce que le poids cible de votre choix soit affiché au-dessus de la flèche.

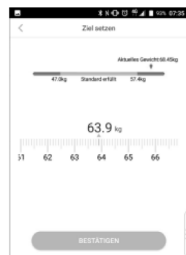


4. Appuyez en bas sur **Confirmer**. Le réglage est enregistré.

Diagramme

Ici, vous trouvez un diagramme affiché pour chaque unité d'analyse. Vous pouvez faire s'afficher un diagramme hebdomadaire, mensuel ou annuel. Dans la rubrique **Données historiques**, vous pouvez voir toutes les mesures d'un jour.


Mon compte

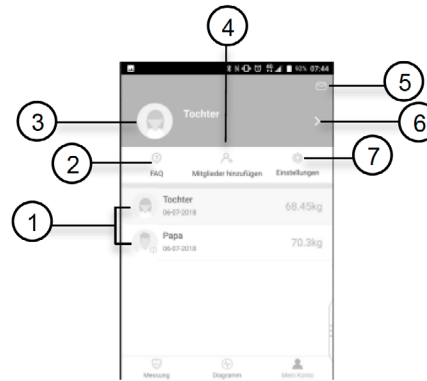

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Tous les utilisateurs | 5 Messages |
| 2 FAQ | 6 Modifier le profil |
| 3 Utilisateur actuel | 7 Réglages |
| 4 Ajouter un utilisateur | |

Supprimer l'utilisateur

Faites glisser l'utilisateur de votre choix vers la gauche et choisissez **Supprimer** pour supprimer l'utilisateur et ses données.

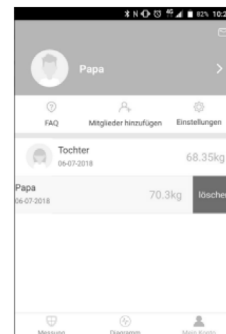

Confirmez le processus de suppression pour le terminer.

Réglages

Couleurs de thème	Modifier la couleur
Se fixer un objectif	Régler le poids souhaité
Unités de mesure du poids	kg, lb, st
Son de mesure	activé / désactivé
Google Fit	Connecter à l'application Google Fit
FitBit	Connecter à l'application FitBit
Mes appareils	Connecter à des balances
Rappel de pesée	Régler le réveil
Mot de passe	Protéger les données personnelles par un mot de passe activé /désactivé
Langues	Anglais, mandarin, chinois, coréen, japonais, allemand, français, russe, espagnol, portugais, arabe, tchèque, italien, turc
Commentaires	Écrire un commentaire
Information	Version actuelle de l'application

Utilisation avec bracelet fitness et VeryFitPro



NOTE :


Votre appareil mobile doit se trouver à proximité de la balance pour permettre l'échange de données par connexion bluetooth.

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile. Si nécessaire, autorisez l'application à vous envoyer des notifications.
2. Connectez votre bracelet fitness à l'application VeryFitPro comme décrit dans le mode d'emploi du bracelet fitness.
3. Assurez-vous que la fonction bluetooth de votre appareil mobile est activée.
4. Dans l'application, appuyez sur le +, puis sur le symbole
5. Appuyez votre pied gauche sur la balance pour l'allumer. La balance se met à calculer.
6. Sélectionnez la balance parmi les appareils à appairer.
7. Sélectionnez **Cliquer sur les mesures** pour pouvoir consulter dans l'application la mesure suivante de votre balance.
8. Tenez-vous pieds nus sur la balance dès qu'elle affiche **0,00 kg**.
9. Restez immobile et calme, les pieds sur les points de mesure argentés. La balance mesure alors votre poids et analyse votre corps.

Contrôle du poids



Cliquez sur l'un des champs du contrôle du poids pour afficher les données.

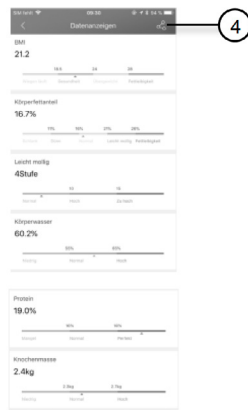

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1 Cliquer sur les mesures | 3 Poids |
| 2 Affichage des données | 4 Partager |

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimer toutes les données.
- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimer l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Posez la balance sur une surface stable et plane pour permettre la plus grande précision et la meilleure reproduction des conditions de mesure.
- Pesez-vous toujours au même endroit. Un sol inégal peut influencer les mesures.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide et un peu de produit vaisselle (si nécessaire).
- Protégez la balance des chocs, de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques, des fortes variations de température, des champs électromagnétiques, et des sources de chaleur.
- Conservez l'emballage hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Stockez la balance dans une position horizontale.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- ATTENTION : L'appareil fait parcourir un courant électrique à travers l'utilisateur pour réaliser les mesures. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes équipées d'un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux. Demandez conseil à votre médecin si vous êtes enceinte ou pourriez l'être.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4501, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.