

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Handgelenk-Bandagen. Die Bandagen stützen das Handgelenk beim Kraftsport und sorgen für mehr Stabilität.

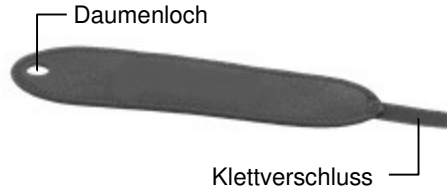
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Handgelenk-Bandagen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 x Handgelenk-Bandage
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material	100 % Neopren
Maße	80 x 5 x 380 mm
Gewicht	29 g

Produktdetails**Verwendung**

Die Handgelenk-Bandage kann entweder über die Handinnen- oder über die Handaußenfläche angelegt werden.

Handinnenfläche

1. Stecken Sie Ihren Daumen durch das Daumenloch der Bandage.
2. Legen Sie sich die Bandage quer über Ihre Handinnenfläche. Der Klettverschluss zeigt dabei nach unten.



3. Wickeln Sie die Bandage um Ihr Handgelenk und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss.

**Handaußenfläche**

1. Stecken Sie Ihren Daumen durch das Daumenloch.
2. Legen Sie sich die Bandage über den Handrücken, der Klettverschluss zeigt dabei nach unten



3. Wickeln Sie die Bandage um Ihr Handgelenk und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss.



Reinigung

Reinigen Sie die Bandage per Handwäsche bis 30°C.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bandages pour poignet. Ils soutiennent le poignet pendant l'effort et assurent une meilleure stabilité.

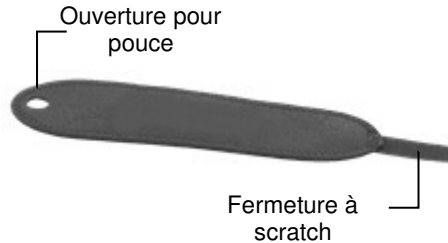
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 bandages pour poignet
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Matériaux	100 % polychloroprène
Dimensions	80 x 5 x 380 mm
Poids	29 g

Description du produit**Utilisation**

Le bandage pour poignet peut être placé soit sur la paume, soit sur le dos de la main.

Côté paume

1. Passez votre pouce dans l'ouverture pour pouce.
2. Placez le bandage en travers de votre paume. La fermeture à scratch doit être orientée vers le bas.



3. Enroulez le bandage autour de votre poignet et attachez-le avec la fermeture à scratch.

**Côté dos de la main**

1. Passez votre pouce dans l'ouverture pour pouce.
2. Placez le bandage sur le dos de votre main. La fermeture à scratch doit être orientée vers le bas.



3. Enroulez le bandage autour de votre poignet et attachez-le avec la fermeture à scratch.



Nettoyage

Nettoyez le bandage à la main à 30 °C max.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.