

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kompakt-Inhalators. Dieser Inhalator erzeugt einen feinen Sprühnebel, der den Inhalations-Wirkstoff direkt in die Atemwege der Lunge befördert.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Inhalator optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Kompakt-Inhalator
- Zerstäuber
- Luftschlauch (200 cm)
- Atemmaske für Erwachsene
- Atemmaske für Kinder
- Mundstück
- 5× Luftfilter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220 – 240 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	63,2 W
Betriebszeit (ohne Pause)	max. 30 Minuten
Pausenzeit	mind. 30 Minuten
Kompressor-Druck	>10 PSI (max. >40 PSI)
Geräuschpegel	≤ 65 dB(A)
freie Kompressor-Luftströmung	≥ 10 l/min
Vernebelungsleistung	≥ 0,15 ml/min
Tröpfchengröße	0,5 – 8 µm
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Maße	28 × 18 × 9,8 cm
Gewicht	1 kg

Produktdetails

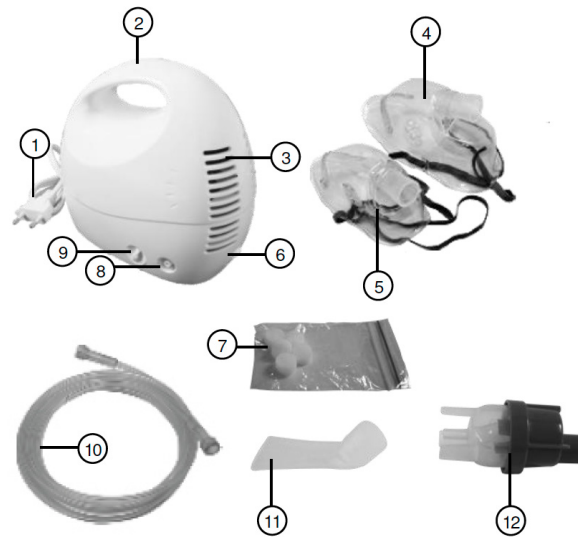

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 Stromkabel | 7 Luftfilter |
| 2 Griff | 8 Schlauchanschluss |
| 3 Luftöffnung | 9 Filterhalterung |
| 4 Atemmaske (Erwachsene) | 10 Luftschlauch |
| 5 Atemmaske (Kinder) | 11 Mundstück |
| 6 Ein/Aus-Schalter | 12 Zerstäuber |



Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Bedienungsanleitung!




HINWEIS:
Es kann vorkommen, dass die Zubehörteile etwas riechen. Reinigen Sie diese daher vor der ersten Anwendung. Der Geruch verflüchtigt sich mit der Zeit.

Wirkstoff einfüllen

So geben Sie den Inhalations-Wirkstoff in den Zerstäuber:

1. Drehen Sie die farbige Kappe des Zerstäubers gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Füllen Sie den Wirkstoff in den Becher des Zerstäubers. Beachten Sie dabei die Minimal- und Maximal-Markierungen.
3. Setzen Sie die Kappe wieder so auf, dass die Prallwand passend auf dem Kegel liegt. Drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn sicher zu.

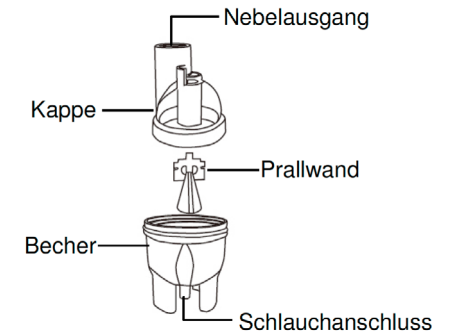

Verwendung



ACHTUNG!
Verwenden Sie Ihren Inhalator nicht in der Nähe entflammbarer Gegenstände oder in Umgebungen mit explosiven Materialien.



HINWEIS:
Reinigen Sie vor der ersten Anwendung die Zubehörteile.

1. Befüllen Sie den Zerstäuber (siehe **Wirkstoff einfüllen**).
2. Stellen Sie Ihren Inhalator auf einen ebenen, festen Untergrund.
3. Verbinden Sie den Stromstecker Ihres Inhalators mit einer geeigneten Steckdose.
4. Schalten Sie Ihren Inhalator ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [I] legen.
5. Lassen Sie Ihren Inhalator 1-2 Minuten laufen.
6. Stecken Sie ein Ende des Luftschlauchs auf den Schlauchanschluss des Zerstäubers.

7. Stecken Sie das andere Ende des Luftschlauchs auf den Schlauchanschluss Ihres Inhalators.
8. Stecken Sie Mundstück/Atemmaske auf den Nebelausgang des Zerstäubers.
9. Setzen Sie den Anweisungen Ihres Arztes entsprechende das Mundstück ein bzw. die Atemmaske auf.
10. Atmen Sie natürlich ein und aus. Beenden Sie die Anwendung, wenn der Wirkstoff aufgebraucht ist.
11. Schalten Sie Ihren Inhalator aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0] legen.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Inhalator nach jeder Anwendung.

1. Schalten Sie Ihren Inhalator aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung
2. Trennen Sie dann den Luftschlauch von Inhalator und Zerstäuber.
3. Trennen Sie Mundstück/Atemmaske vom Zerstäuber.
4. Drehen Sie die Kappe des Zerstäubers gegen den Uhrzeigersinn auf. Nehmen Sie sie dann ab.
5. Entleeren Sie den Becher.
6. Reinigen Sie alle Teile des Zerstäubers unter fließendem Wasser. Oder legen Sie sie für 15 Minuten in warmes, mit etwas Essig versehenem Wasser.



ACHTUNG!

Geben Sie den Zerstäuber nicht in heißes oder kochendes Wasser, dies kann zu Schäden zur Folge haben.

7. Trocknen Sie den Zerstäuber vollständig, bevor Sie ihn einlagern.

Luftfilter wechseln

Tauschen Sie den Luftfilter nach 300 Anwendungen oder alle 3 Monate aus. Wechseln Sie den Luftfilter nur, wenn Ihr Inhalator ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.

1. Ziehen Sie die Filterhalterung aus Ihrem Inhalator.
2. Nehmen Sie den alten Filter heraus.
3. Legen Sie einen neuen Filter ein.
4. Schieben Sie die Filterhalterung wieder in den Inhalator.



HINWEIS:

Sollte der Filter feucht sein, lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn einsetzen.

Lagerung

Lagern Sie Ihren Inhalator an einem gut belüfteten Ort. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Umgebungstemperatur: -40° bis 55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95 %
- Luftdruck: 0,05 bis 0,106 MPa
- Der Luftschlauch darf nicht geknickt werden.

Problemlösungen

Der Inhalator ist zu laut.

- Setzen Sie den Luftfilter ein.

Der Zerstäuber funktioniert nicht.

- Schalten Sie Ihren Inhalator ein.
- Reinigen Sie Ihren Inhalator wie unter **Reinigung** beschrieben.
- Überprüfen Sie den Luftschlauch. Stellen Sie sicher, dass er nicht geknickt oder gequetscht ist.
- Tauschen Sie den Luftfilter aus.
- Befüllen Sie den Zerstäuber mit einem Inhalations-Wirkstoff.
- Überprüfen Sie den Sitz der Zerstäuber-Kappe.

Auf dem Luftschlauch haben sich Wassertropfen gebildet.

- Der Zerstäuber ist überfüllt. Reduzieren Sie die Wirkstoffmenge, beachten Sie dabei die Minimal- und Maximal-Markierungen am Becher.
- Der Zerstäuber wurde nach der Reinigung nicht vollständig getrocknet. Öffnen und schließen Sie die Kappe des Zerstäubers ein paar Mal, bis die Wassertropfen verschwinden.



HINWEIS:

Bei allen anderen Problemen sollten Sie Ihren Händler kontaktieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. Halten Sie die elektronischen Komponenten des Produkts fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie die elektronischen Komponenten des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, es sei denn Sie sind unter Aufsicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 10°C oder über 40°C.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei Menschen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Schützen Sie die elektronischen Komponenten des Produkts vor Wasser- oder anderen Flüssigkeitsspritzern.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder den Luftfilter tauschen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät nie länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um Überhitzungen zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät anschließend mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter Reinigung beschrieben.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am

- Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8756-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8756 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:


www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Name und Adresse des Herstellers

HUIZHOU JINGHAO
MEDICAL TECHNOLOGY
CO.,LTD
Floor6, Huicheng Industry
Building, No.9
Huifeng Dong'er Road,
ZhongKai High-tech Zone,
Huizhou City, Guandong
Province, China

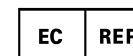

Name und Adresse des autorisierten Vertreters in der Europäischen Gemeinschaft

Shanghai International
Holding Corp. GmbH
(Europe), Eiffelstr. 80,
20537 Hamburg, Germany,
Tel.: +49-40-2513175, Fax:
+49-40-255726, Dimdi No.:
DE/0000040627, E-mail:
shholding@hotmail.com



Artikelnummer

NX-8756-675



Los Nr.



Typ

Type BF



Produktions-jahr-Monat

XXXX-XX



Erfüllt die European
Medical Device Directive
(93/42/EEC) und den
Zusatz 2004/47/EC

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet inhalateur compact. Il produit une fine brume qui permet au produit actif d'être dirigé directement dans les poumons.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Inhalateur compact
- Nébuliseur
- Tuyau à air (200 cm)
- Masque pour adulte
- Masque pour enfant
- Embout buccal
- 5 filtres à air
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	63,2 W
Durée de fonctionnement sans pause	Jusqu'à 30 min
Durée de la pause	Au moins 30 min
Pression du compresseur	> 10 PSI (max. > 40 PSI)
Niveau de bruit	≤ 65 dB(A)
Flux d'air libre du compresseur	≥ 10 L/min
Puissance de vaporisation	≥ 0,15 ml/min
Taille des gouttelettes	0,5 – 8 µm
Température ambiante	10 – 40 °C
Dimensions	28 × 18 × 9,8 cm
Poids	1 kg

Description du produit

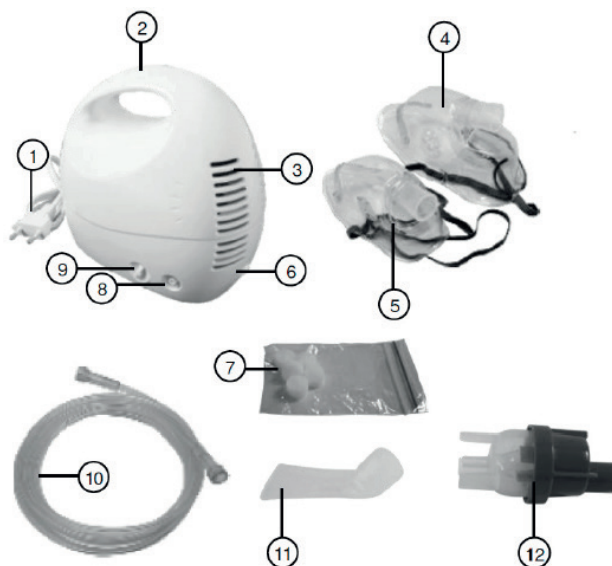

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Câble d'alimentation | 7 Filtre à air |
| 2 Manche | 8 Embout pour tuyau |
| 3 Ouverture d'aération | 9 Support du filtre |
| 4 Masque (pour adulte) | 10 Tuyau à air |
| 5 Masque (pour enfant) | 11 Embout buccal |
| 6 Interrupteur marche/arrêt | 12 Nébuliseur |



Lisez impérativement le mode d'emploi avant l'utilisation !




NOTE :

Il peut arriver qu'une odeur se dégage des accessoires. Vous devez donc les nettoyer avant la première utilisation. L'odeur se dissipe avec le temps.

Verser le produit dans l'appareil

Versez le produit d'inhalation dans le nébuliseur de la manière suivante :

1. Tournez le couvercle coloré du nébuliseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fermer.
2. Versez le produit dans le récipient du nébuliseur. Ce faisant, respectez les graduations indiquant le niveau maximal et minimal.
3. Remplacez le couvercle de manière à ce que le déflecteur se trouve comme il convient sur le cône. Revissez-le ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

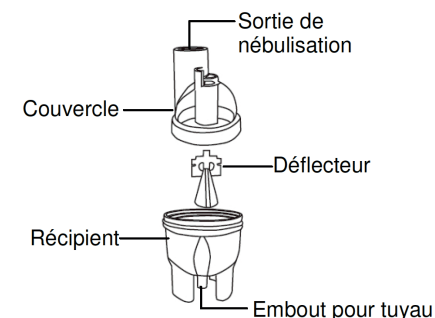

Utilisation



ATTENTION !
N'utilisez l'inhalateur ni à proximité d'objets inflammables ni dans des environnements contenant des matériaux explosifs.



NOTE :
Avant la première utilisation, nettoyez les accessoires.

1. Remplissez le nébuliseur (voir **Verser le produit dans l'appareil**).
2. Posez l'inhalateur sur une surface plane et solide.
3. Branchez la fiche d'alimentation de l'inhalateur à une prise électrique adaptée.
4. Allumez l'inhalateur en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [I].
5. Laissez votre inhalateur fonctionner pendant 1 à 2 minute(s).
6. Fixez une extrémité du tuyau à air sur l'embout pour tuyau du nébuliseur.

- Fixez l'autre extrémité du tuyau à air sur l'embout pour tuyau de l'inhalateur.
- Placez l'embout buccal/le masque sur la sortie de nébulisation du nébuliseur.
- En fonction des instructions de votre médecin, utilisez l'embout buccal ou le masque.
- Inspirez et expirez de manière naturelle. Cessez l'utilisation lorsque tout le produit est utilisé.
- Éteignez l'inhalateur en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur la position [0].

Nettoyage

Nettoyez l'inhalateur après chaque utilisation.

- Éteignez l'inhalateur et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Séparez ensuite le tuyau à air de l'inhalateur et du nébuliseur.
- Séparez l'embout buccal/le masque du nébuliseur.
- Tournez le couvercle du nébuliseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir. Retirez-le.
- Videz le récipient.
- Rincez tous les éléments du nébuliseur sous l'eau courante. Ou bien plongez-les pendant 15 minutes dans de l'eau tiède additionnée d'un peu de vinaigre.



ATTENTION!

Ne versez pas d'eau chaude ou bouillante dans le nébuliseur, car cela peut l'endommager.

- Séchez le nébuliseur complètement avant de le stocker.

Changer le filtre à air

Remplacez le filtre à air après 300 utilisations ou après 3 mois. Remplacez le filtre à air uniquement lorsque l'inhalateur est éteint et débranché de l'alimentation électrique.

- Retirez le support du filtre de l'inhalateur.
- Retirez l'ancien filtre.
- Insérez un nouveau filtre.
- Remplacez le support du filtre dans l'inhalateur.



NOTE :

Si le filtre est humide, laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place.

Stockage

Rangez l'inhalateur uniquement dans un endroit bien ventilé.

Soyez attentif aux points suivants :

- Température ambiante : - 40 °C – 55 °C
- Humidité de l'air relative : ≤ 95 %
- Pression de l'air : 0,05 – 0,106 MPa
- Le tuyau à air ne doit pas être plié.

Dépannage

L'inhalateur est trop bruyant.

- Mettez le filtre à air en place.

Le nébuliseur ne fonctionne pas.

- Allumez l'inhalateur.
- Nettoyez l'inhalateur comme décrit sous **Nettoyage**.
- Vérifiez le tuyau à air. Assurez-vous qu'il n'est ni plié ni écrasé.
- Remplacez le filtre à air.
- Remplissez le nébuliseur avec un produit pour inhalation.
- Vérifiez que le couvercle du nébuliseur est correctement placé.

Des gouttes d'eau se sont formées sur le tuyau à air.

- Le nébuliseur est trop rempli. Réduisez la quantité de produit. Respectez les graduations indiquant le niveau maximal et minimal.
- Le nébuliseur n'a pas été complètement séché après le nettoyage. Ouvrez puis refermez le couvercle du nébuliseur plusieurs fois, jusqu'à ce que les gouttes d'eau disparaissent.



NOTE :

Pour tous les autres problèmes, contactez votre revendeur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses

accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Toute modification ou réparation sur l'appareil ou ses accessoires ne doit être effectuée que par le fabricant ou par les personnes officiellement autorisées.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. N'exposez pas les composants électroniques de l'appareil à l'humidité.
- Ne plongez jamais les composants électroniques de l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants s'ils ne sont pas sous votre surveillance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'utilisez pas l'appareil à une température inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C.
- N'utilisez l'appareil que pour des personnes.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Protégez les composants électroniques de l'appareil de l'eau et des autres liquides.
- Avant de le nettoyer ou de changer le filtre à air, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présente

des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sûre.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surchauffe, ne laissez pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 minutes en continu. Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le rallumer.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué dans le chapitre **Nettoyage**.
- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.

- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8756 conforme aux directives actuelles 93/42/CEE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE du Parlement Européen.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Nom et adresse du fabricant
Huizhou Jinghao Medical Technology Co., Ltd.
Floor6, Huicheng Industry Building, No.9
Huifeng Dong'er Road,
ZhongKai High-tech Zone,
Huizhou City, Guangdong Province, China



Nom et adresse du représentant légal du fabricant dans l'Union Européenne.
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffelstr. 80, 20537 Hamburg, Germany,
Tel. : +49-40-2513175,
Fax : +49-40-255726,
Dimdi No. : DE/0000 40627,
E-mail : shholding@hotmail.com



Référence du produit
NX-8756-675



Numéro de lot



Type
Type BF



Année et mois de production
XXXX-XX



Ce produit est conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 93/42/CEE, relative aux dispositifs médicaux et son ajout 2004/47/EC.