

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bandage.  
 Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Bandage optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Handgelenk-Bandage (NX-9307, NX-9308, NX-9311)
- Ellbogen-Bandage (NX-9309)
- Sprunggelenk- und Knöchel-Bandage (NX-9310)
- Knöchel-Bandage (NX-9317, NX-9318)
- Anleitung

### Produktvarianten

- NX-9307: Handgelenk-Stützbandage mit Schiene, links, schwarz
- NX-9308: Handgelenk-Stützbandage mit Schiene, rechts, schwarz
- NX-9309: 2er-Set Ellbogen-Bandagen mit Kompressions-Kissen, Universalgröße
- NX-9310: Sprunggelenk- und Knöchel-Bandage, unisex, Größe XS – S
- NX-9311: Handgelenk-Bandage aus Neopren, Universalgröße, für links und rechts
- NX-9317: Knöchel-Bandage mit Gel-Kissen, unisex, Größe S – M
- NX-9318: Knöchel-Bandage mit Gel-Kissen, unisex, Größe M – L

### Produktdaten


Material	NX-9307, NX-9308, NX-9309, NX-9310	65 % Gummi, 35 % Nylon
	NX-9311	70 % Neopren, 30 % Polyester
	NX-9317, NX-9318	50 % Polyamid, 24 % Elastodien, 22 % Polyester, 4 % Elasthan
Maße	NX-9307	47,5 x 22,5 cm
	NX-9308	47,5 x 22,5 cm
	NX-9309	39 x 5,5 cm
	NX-9310	20 x 21 cm
	NX-9311	9 x 31 cm
	NX-9317, NX-9318	25 x 24 cm
Gewicht	NX-9307, NX-9308, NX-9309, NX-9310	60 g
	NX-9311	18 g
	NX-9317	65 g
	NX-9318	76 g

### Verwendung – Handgelenkbandage (NX-9307, NX-9308)



1. Lösen Sie alle Klettverschlüsse und legen Sie die Bandage ausgebreitet vor sich auf einen Tisch. Bei der Bandage für den linken Arm zeigen die drei kleinen Klettverschlüsse nach rechts. Bei der Bandage für den rechten Arm zeigen die drei kleinen Klettverschlüsse nach links.
2. Legen Sie Ihr Handgelenk passend auf die Bandage.
3. Klappen Sie die Bandage über Ihr Handgelenk und fixieren Sie sie mit den zwei unteren kleinen Klettverschlüssen.
4. Führen Sie dann den oberen Klettverschluss zwischen Daumen und Zeigefinger hindurch und fixieren Sie ihn.
5. Legen Sie den breiten Klettverschluss um die Bandage herum.

### Verwendung – Handgelenkbandage (NX-9311)

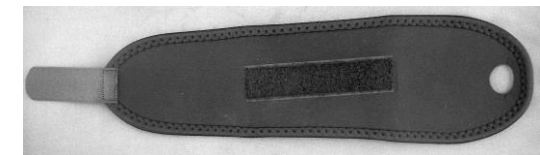

Die Handgelenkbandage kann entweder über die Handinnenfläche oder über die Handaußenfläche angelegt werden.

#### Handinnenfläche:

Stecken Sie Ihren Daumen durch die Öffnung und legen Sie sich die Bandage quer über Ihre Handinnenfläche. Der Klettverschluss zeigt nach oben. Wickeln Sie dann die Bandage um Ihr Handgelenk und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss.



### Handaußenfläche:

Stecken Sie Ihren Daumen durch die Öffnung. Legen Sie sich die Bandage über den Handrücken, der Klettverschluss zeigt nach oben. Wickeln Sie dann die Bandage um Ihr Handgelenk und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss.



### Verwendung – Ellbogenbandage (NX-9309)



1. Legen Sie die gepolsterte Bandage auf den Punkt am Ellbogen, den Sie stützen möchten.
2. Legen Sie das schmale Ende um Ihren Arm herum und führen Sie es durch die Schnalle.
3. Ziehen Sie die Bandage fest und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss.

### Verwendung – Sprunggelenkbandage (NX-9310)



Öffnen Sie den Klettverschluss und ziehen Sie die Bandage über Ihren Fuß. Platzieren Sie Ihre Ferse in der Öffnung. Fixieren Sie die Bandage, indem Sie den Klettverschluss schließen.

### Verwendung – Knöchelbandage (NX-9317, NX-9318)



Ziehen Sie die Bandage über Ihren Fuß bis zu Ihrem Knöchel. Achten Sie darauf, dass die schmalen Elemente des Gekissens nach oben zeigen. Platzieren Sie Ihre Ferse im hellblauen Keil der Bandage.

### Reinigung

Waschen Sie die Bandage nur mit der Hand bei max. 40°C. Lassen Sie sie nicht chemisch Reinigen. Bleichen und Bügeln Sie die Bandage nicht. Geben Sie die Bandage nicht in den Wäschetrockner.



NX-9311: Verwenden Sie als Reinigungsmittel nur Lösungspetroleum.

### Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.speeron.de](http://www.speeron.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bandage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- NX9307, NX9308, NX9311 : bandages pour poignet
- NX9309 : coudière
- NX9310 : bandage pour cheville
- NX9317, NX9318 : chevillères
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- NX9307 : bandage pour poignet gauche avec bande à scratch
- NX9308 : bandage pour poignet droit avec bande à scratch
- NX9309 : 2 coudières avec coussinets de compression, taille universelle
- NX9310 : bandage cheville, unisexe, taille XS/S
- NX9311 : bandage poignet en néoprène pour gaucher/droitier, taille universelle
- NX9317 : chevillère unisexe à coussinets en gel, taille S - M
- NX9318 : chevillère unisexe à coussinets en gel, taille M - L

**Caractéristiques du produit**

Matériaux	NX9307, NX9308, NX9309, NX9310	65 % caoutchouc, 35 % nylon
	NX9311	70 % néoprène, 30 % polyester
	NX9317 NX9318	50 % polyamide, 24 % élastodiène 22 % polyester, 4 % élasthanne
Dimensions	NX9307	47,5 x 22,5 cm
	NX9308	47,5 x 22,5 cm
	NX9309	39 x 5,5 cm
	NX9310	20 x 21 cm
	NX9311	9 x 31 cm
	NX9317 NX9318	25 x 24 cm 25 x 24 cm
Poids	NX9307, NX9308, NX9309, NX9310	60 g
	NX9311	18 g
	NX9317	65 g
	NX9318	76 g

**Utilisation des bandages pour poignet (NX9307, NX9308)**


1. Ouvrez la fermeture à scratch et posez le bandage déplié devant vous, sur une table. Les trois petites fermetures à scratch du bandage pour poignet gauche sont orientées vers la droite. Les trois petites fermetures à scratch du bandage pour poignet droit sont orientées vers la gauche.
2. Placez votre poignet sur le bandage comme il convient.
3. Fermez le bandage autour de votre poignet et attachez-le avec les deux petites fermetures à scratch du dessous.
4. Faites passer la fermeture à scratch du dessus entre votre pouce et votre index et fermez-la.
5. Fermez la large fermeture à scratch en la faisant passer autour du bandage.

**Utilisation des bandages pour poignet (NX9311)**


Le bandage peut être placé soit sur la paume soit sur le dos de la main.

**Côté paume :**

Passez votre pouce dans l'ouverture et placez le bandage en travers de votre paume. La fermeture à scratch doit être orientée vers le haut. Enroulez le bandage autour de votre poignet et attachez-le avec la fermeture à scratch.



### Côté dos de la main :

Passez votre pouce dans l'ouverture. Placez le bandage sur le dos de votre main. La fermeture à scratch doit être orientée vers le haut. Enroulez le bandage autour de votre poignet et attachez-le avec la fermeture à scratch.



### Utilisation des coudières (NX9309)



1. Placez la partie rembourrée de la coudière contre la partie du coude que vous souhaitez soutenir.
2. Enroulez la fine extrémité autour de votre bras et faites-la passer dans la boucle.
3. Serrez bien le bandage et attachez-le avec la fermeture à scratch.

### Utilisation du bandage pour cheville (NX9310)



Ouvrez la fermeture à scratch et placez le bandage sur votre pied. Placez votre talon dans l'ouverture. Attachez le bandage en fermant la fermeture à scratch.

### Utilisation des chevillères (NX9317, NX9318)



Couvrez votre pied avec le bandage jusqu'à la cheville. Veillez à ce que les petits éléments des coussins à gel soient orientés vers le haut. Placez votre talon dans le coin bleu clair du bandage.

### Nettoyage

Lavez les bandages uniquement à la main et à l'eau tiède (40 °C max.). Ne les nettoyez pas avec des produits chimiques. Ne lavez pas les bandages à l'eau de Javel. Ne les repassez pas. Ne les placez pas au sèche-linge.



NX9311 : utilisez uniquement des hydrocarbures comme produit nettoyant pour le nettoyage à sec.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement de ces produits. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !