

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Sport-Kniebandage mit Patellaschoner und Gel-Kissen, die Sie für beide Knie verwenden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Sportbandage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sport-Kniebandage
- Produktanleitung

Produktdaten

Atmungsaktiv	Ja
Geleinlagen	3
Maße (BxH)	58,5 x 18,8 cm

Verwendung

Öffnen Sie alle Klettverschlüsse und entfalten Sie die Sportbandage. Legen Sie dann die runde Öffnung der Bandage über Ihre Kniescheibe und fixieren Sie die Bandage mithilfe der drei Klettverschlüsse. Sie können die Bandage sowohl für Ihr rechtes als auch für Ihr linkes Knie verwenden.

Reinigung

Die Bandage ist nur für Handwäsche geeignet. Nicht bleichen, bügeln oder chemisch reinigen!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.speeron.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette genouillère avec coussinets à gel et soutien de la rotule, laquelle peut être utilisée pour vos deux genoux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Genouillère
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Respirant	Oui
Coussinets à gel	3
Dimensions (L x H)	58,5 x 18,8 cm

Utilisation

Ouvrez toutes les bandes à scratch et déployez la genouillère. Placez ensuite l'ouverture ronde de la genouillère sur votre rotule et attachez-la à l'aide des trois bandes à scratch. Vous pouvez utiliser votre genouillère aussi bien pour le genou droit que pour le genou gauche.

Nettoyage

La genouillère peut être lavée à la main uniquement. Ne la lavez pas à la Javel, ne la repassez pas et ne la nettoyez pas à sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !