



Gel-Schuheinlagen für Größe 39-45

Anwendung

- Schneiden Sie die Schuheinlagen mit einer Schere entlang der Markierung passend auf Ihre Schuhgröße zu.
- Legen Sie die Schuheinlagen in Ihre Schuhe. Achten Sie dabei darauf, dass die richtige Einlage im rechten bzw. im linken Schuh liegt.
- Danach ziehen Sie Ihre Schuhe wie gewohnt an.
- Nachdem Sie die Ihre Schuhe ausgezogen haben, waschen sie die Einlagen unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie die Schuheinlagen ab dann gründlich ab und verstauen Sie diese an einem kühlen Ort.

Tipp: Gerade im Sommer oder nach einem anstrengenden Tag auf den Beinen ist es sehr angenehm, wenn die Schuheinlagen einige Zeit davor im Kühlschrank waren. Das Gel in den Einlagen speichert die Kühle und gibt Sie dann an Ihre Füße ab. Achten Sie jedoch darauf, dass die Einlagen nicht zu kalt sind, da das als unangenehm an den Füßen empfunden werden kann.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Achten Sie darauf, dass die Schuheinlagen nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen in Berührung kommen.
- Achten Sie auch darauf, dass Sie keine kleinen Steine in den Schuhen haben, die die Einlagen beschädigen könnten.
- Setzen Sie die Schuheinlagen keinen Temperaturen von über 50°C aus.
- Falls Gel aus den Schuheinlagen ausläuft, achten Sie darauf, dass Sie oder jemand anders kein Gel verschlucken.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Semelle en gel Pointure: 39-45

Mode d'emploi

- Pour adapter les semelles à votre pointure, découpez-les avec des ciseaux en suivant les pointillés.
- Posez les semelles dans vos chaussures. Vérifiez que la semelle droite est bien dans la chaussure droite et la gauche de même.
- Chaussez vous.
- Veuillez passer les semelles sous de l'eau propre après utilisation. Séchez-les correctement et mettez-les à un endroit frais.

Conseil: Nous vous conseillons de mettre les semelles dans votre réfrigérateur quelques minutes avant leur utilisation. Le gel stocke le froid et le diffuse ensuite. Une sensation désagréable peut survenir si vous refroidissez les semelles trop longtemps.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne touchez aucun objet tranchant ou pointu avec les semelles.
- Vérifiez que des petits cailloux ne restent pas dans vos chaussures avant d'insérer les semelles.
- N'exposez pas les semelles à des températures dépassant les 50°C.
- Faites attention que personne n'avale le gel des semelles si celles-ci se fissurent.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

