

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Gel-Schuheinlagen. In die Schuheinlage ist ein Magnet eingearbeitet. Er befindet sich direkt an der Stelle des Schwingungsbogens des Fußes und regt so Ihre Fuß-Reflexzonen an. Das Gel in den Schuheinlagen federt Ihren Auftritt ab und kann so für eine Entlastung der Bandscheiben sorgen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Solar-LED-Glasbaustein optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gel-Schuheinlagen mit Magnet
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- PE-1782-675:
Gel-Schuheinlagen mit Magnet Gr.36-40
- PE1781-675:
Gel-Schuheinlagen mit Magnet Gr.39-45

Verwendung

- Schneiden Sie die Schuheinlagen mit einer Schere entlang der Markierung passend auf Ihre Schuhgröße zu.
- Legen Sie die Schuheinlagen in Ihre Schuhe. Achten Sie dabei darauf, die passende Einlage in den jeweils richtigen Schuh zu legen.
- Ziehen Sie danach Ihre Schuhe wie gewohnt an.
- Waschen Sie die Einlagen nach dem Tragen in den Schuhen unter fließendem Wasser und trocknen Sie diese gründlich ab.
- Lagern Sie die Einlagen an einem kühlen Ort.
- Verwenden Sie die Gel-Schuheinlagen nicht beim Sport, da diese sonst durch die erhöhte Belastung beschädigt werden könnten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.



HINWEIS:

Gerade im Sommer oder nach einem anstrengenden Tag auf den Beinen ist es sehr angenehm, wenn die Schuheinlagen einige Zeit vor dem Tragen im Kühlschrank waren. Das Gel in den Einlagen bleibt einige Zeit kühl und erfrischt so Ihre Füße. Achten Sie jedoch darauf, dass die Einlagen nicht zu kalt sind, da dies sonst als unangenehm an den Fußsohlen empfunden wird.