



Alkoholtester

Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

- Führen Sie den Alkoholtest mehrmals hintereinander durch, um ein besseres Ergebnis zu erhalten.
- Benutzen Sie den Alkoholtester nicht sofort, nachdem Sie Alkohol getrunken haben, sondern warten Sie bis ca. 30 Minuten nach Trinkende. Damit stellen Sie sicher, dass der Alkoholgehalt des Atems aus Ihrer Lunge gemessen wird und nicht der aus Ihrem Mund, der das Ergebnis verfälschen könnte
- Da der Sensor hochempfindlich ist, funktioniert das Gerät nicht, wenn es nass wird oder beschädigt ist. Bewahren Sie das Gerät daher an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf
- Das Messergebnis des Alkoholtesters kann durch extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit beeinflusst werden
- Jeder Körper reagiert anders auf den Einfluss von Alkohol. Es ist möglich, dass eine Person körperlich bereits fahruntüchtig ist, obwohl er die gesetzliche Promillegrenze zum Führen von Fahrzeugen noch nicht erreicht hat. Prinzipiell gilt: Kein Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluß von Alkohol!
- Das Gerät ist nicht geeicht, das heißt die Messergebnisse können von denen der geeichten Messgeräte der Polizei abweichen

Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes durch zurückschieben
- Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung
- Schließen Sie das Batteriefach wieder

Bedienung

Messen des Alkoholgehaltes

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste unterhalb des LCD Displays 2 Sekunden lang. Ein Countdown beginnt von 7 bis 0. Im Display blinkt das Wort „Wait“
- Sobald der Countdown bei 0 angekommen ist, ertönt ein Tonsignal. Pusten Sie nun 3-4 Sekunden in den Sensorbereich am oberen Rand des Gerätes. Atmen Sie dabei einen konstanten Luftstrom aus und achten Sie darauf, dass der Winkel der ausgeatmeten Luft im Verhältnis zum Alkoholtester dabei gleich bleibt. Das Wort „Blow“ blinkt in dieser Zeit im Display
- Danach erscheint das Testergebnis begleitet von einem Tonsignal im Display
- Das Gerät schaltet sich nach ein paar Sekunden automatisch aus
- Um genauere Messergebnisse zu erzielen, wiederholen Sie die Messung 2-3 Mal hintereinander

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterie



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

