

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Endoskop Body Cam.

Mit dieser Kamera können Sie Ihren Augen sonst verborgene Körperstellen sichtbar machen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie diese Body Cam optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Body Cam
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x Batterien AAA

## Eigenschaften


Eingebaute Minikamera  
WiFi-Verbindung  
Kostenlose APPs für iOS/Android  
Aufnahme von Bildern und Videos  
Helle LED-Leuchte  
Leichte Bedienung (One touch)

## Inbetriebnahme

1. Für die Verbindung Ihres Smartphones mit der Kamera benötigen Sie die App **BC-500 by newgen medicals**.
  - 1.1. Öffnen Sie hierzu den App Store (iOS) bzw. Google Play (Android)
  - 1.2. Suchen Sie nach **BC-500 by newgen medicals**.
  - 1.3. Laden Sie die App wie gewohnt herunter und installieren Sie sie (Systemvoraussetzung: iOS 5.0 oder höher, Android 2.3 oder höher).
2. Batteriefach öffnen (siehe Bild unten), Batterien (2 AAA) in das Batteriefach einlegen (Bitte Polarität beachten)



3. Kamera einschalten  
Knopf ca 3 Sekunden gedrückt halten und blaue LED wird aufleuchten.

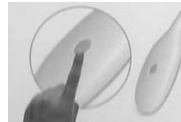

4. Suchen Sie im WLAN-Menü Ihres Smartphones nach **Body Cam**.
  - 4.1. Verbinden mit **Body Cam**.
  - 4.2. Zurück auf die Bedieneroberfläche
  - 4.3. **BC-500 by newgen medicals-APP** auswählen, nach dem Start der App folgen 4 Hinweisseiten, die die Eigenschaften der App beschreiben.
5. Kamera kann jetzt benutzt werden
6. Bilder oder Videos können nun auf dem Smartphone gespeichert werden

## Verwendung

Mit dieser Kamera können Sie Bilder oder Videos machen und anschauen (z.B. von der Mundhöhle oder von Hautpartien) zwecks Kontrolle und auf Ihrem Smartphone abspeichern, um sie ggf. einem Arzt zu zeigen für eine fachkundige Diagnose.

## Umschalten Video / Bild

Während das Livebild der Kamera zu sehen ist, befindet sich oben links im Eck eine Foto- bzw. Videokamera. Mit einem Klick auf das Symbol kann man umschalten.

## Auslöser für Bild oder Video

Auf der linken Seite mittig mit dem „Auslöser“ wird dann die Aufnahme gestartet oder gestoppt, bzw. das Bild geschossen.

Tippen Sie oben rechts auf das Play-Symbol, um Ihre Fotos oder Videos abzuspielen oder zu löschen.

Tippen Sie unten rechts auf das Zahnrad-Symbol, um Einstellungen vorzunehmen.

## Technische Daten

WiFi: IEEE 802.11g / 802.11n

Kameraauflösung: 320 x 240 pixels

Videoformat: YUV

Focusreichweite: 10~30mm

Effektive Reichweite: 3m

Wartezeit: <0,2s

Arbeitszeit: über 30min. Ununterbrochen

Grösse: 176x35x27mm

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren

Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/

Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3784 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
20.03.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3784 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra endoscopique Body Cam. Cette caméra vous permet d'accéder à des parties de votre corps que vos yeux ne peuvent pas voir.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Body Cam
- Mode d'emploi

*Accessoires requis (non fournis): 2x piles AAA*

## Caractéristiques

Mini-caméra intégrée

Connexion Wi-Fi

Applications gratuites pour iOS/Android

Enregistrement de photos et vidéos

Éclairage à LED

Utilisation facile (One Touch)

## Mise en marche

1. Pour connecter votre smartphone à la caméra, vous devez installer l'application **BC-500 by newgen medicals**.

- 1.1. Pour cela, ouvrez App Store (iOS) ou Google Play (Android).
- 1.2. Recherchez **BC-500 newgen medicals**.
- 1.3. Téléchargez l'application comme à votre habitude et installez-la (système requis : iOS version 5.0 ou supérieure, Android version 2.3 ou supérieure). Ouvrez le compartiment à piles (voir illustration ci-dessous), placez 2 piles AAA dans le compartiment (veillez à respecter la polarité).



2. Allumer la caméra  
Appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes, la LED bleue s'allume.



3. Dans le menu Wi-Fi de votre smartphone, recherchez **Body Cam**.
- 3.1. Connexion avec **Body Cam**
- 3.2. Retour à l'interface utilisateur

- 3.3. Sélectionnez l'application **Body Cam** : après ouverture de l'application, 4 pages s'affichent, décrivant les caractéristiques de l'application.
4. La caméra peut maintenant être utilisée.
5. Les photos et vidéos peuvent être enregistrées sur le smartphone.

## Utilisation

Cette caméra vous permet de réaliser des prises de vue photos ou vidéo (pour contrôler par exemple votre cavité buccale ou votre peau). Vous pouvez ensuite enregistrer ces prises de vue sur votre smartphone et les transmettre à un médecin afin d'obtenir un diagnostic professionnel.

## Basculer entre vidéo et photo

Lorsque les images en direct de la caméra sont affichées, un symbole représentant un appareil photo ou une caméra vidéo est visible dans le coin en haut à gauche. Appuyez sur ce symbole pour basculer d'une fonction à l'autre.

## Déclencheur pour photo ou vidéo

Le "déclencheur" (situé sur le côté gauche, au milieu) permet de démarrer ou arrêter un enregistrement vidéo, ou de prendre une photo.

Appuyez sur le symbole "Play" (en haut à droite) pour lire ou supprimer vos photos et vidéos.

Appuyez sur le symbole de la roue dentée (en bas à droite) pour procéder aux réglages.

## Caractéristiques techniques

Wi-Fi : IEEE 802.11g / 802.11n

Résolution de la caméra : 320 x 240 pixels

Format vidéo : YUV

Distance focale : 10~30 mm

Portée effective : jusqu'à 3 m

Temps de latence : < 0,2 seconde

Autonomie en fonctionnement : plus de 30 minutes en continu

Dimensions : 176 x 35 x 27 mm

Alimentation : 2 piles AAA

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3784 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
20.03.2015