

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mund-Nasen-Schutzmasken. Dank FFP2-Standard schützen Sie sich so effektiv gegen atmosphärische Partikel.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Atemschutzmasken optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Einweg-Atemschutzmasken, 10 Stück
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Schutzklasse	FFP2 NR
Norm	EN149:2001+A1:2009
Notifizierte Stelle	Nr. 0598 SHS FIMKO OY Takomotie 8 00380 HELSINKI, Finnland

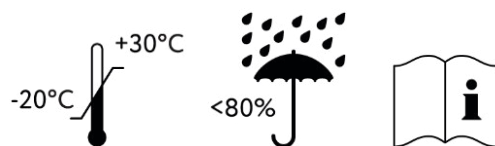

Lagerbedingung und Gültigkeitsdauer:

Ungeöffnete Verpackung muss bei -20 °C bis +30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80 % gelagert werden. Die Haltbarkeitsdauer beträgt drei Jahre nach Produktionsdatum.



WICHTIG!

Vor Gebrauch die Anwendungshinweise und Warnungen in dieser Anleitung lesen und verstehen. Bewahren Sie die Anweisungen für späteren Gebrauch auf.



Anweisungen für das Aufsetzen und Entsorgen:

1. Waschen Sie sich die Hände gründlich und trocknen Sie sie ab, bevor Sie die Maske aufsetzen.
2. Nehmen Sie die Maske an den Halteschlaufen auf, mit dem Nasenbügel nach außen. Platzieren Sie die Maske mit dem Nasenbügel über der Nase, bedecken Sie Mund und Nase und ziehen die Schlaufen über die Ohren.
3. Drücken Sie den Nasenbügel auf den Nasenrücken, um ihn an die Nasenform anzupassen und Dichtigkeit zum Gesicht zu gewährleisten.
4. Zur Überprüfung der Dichtigkeit, drücken Sie die Maske mit den Händen an den Rändern an das Gesicht. Atmen Sie kräftig ein. Sollte Luft am Nasenbügel einströmen, passen Sie diesen nochmals an. Sollte Luft an den Seiten einströmen, passen Sie die Halteschlaufen an. Bis zur Dichtigkeit einstellen. Sobald die Maske korrekt sitzt, kann sie verwendet werden.
5. Nehmen Sie die Maske nach Gebrauch ab und entsorgen Sie sie. Fassen Sie die Maske dabei an den Schlaufen und ziehen Sie sie nach vorne ab. Entsorgen Sie die Maske in einem geschlossenen Abfallbehälter oder bewahren Sie sie in einem dichten Gefäß bis zur Entsorgung auf.
6. Waschen Sie nach dem Ablegen der Maske gründlich die Hände.



HINWEISE:

1. Vor dem Gebrauch Verpackung auf Beschädigungen überprüfen.
2. Vermeiden Sie es, die Innenseite der Maske zu berühren, um ihre Sauberkeit zu sichern.
3. Vermeiden Sie es die Maske zu berühren, während Sie sie tragen.
4. Nehmen Sie durchfeuchtete Masken ab und entsorgen Sie diese.
5. Die Maske ist ein Einwegprodukt und darf daher nicht wiederverwendet werden.
6. Tragen Sie diese Maske nicht, wenn Sie Atembeschwerden haben.

7. Die Maske wird nicht zur Anwendung bei Kindern empfohlen.
8. Gesichtsbehaarung kann die Wirksamkeit der Maske erheblich beeinträchtigen.
9. Mit NR gekennzeichnet Masken dürfen nicht länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden.



ACHTUNG!

Die Maske bietet nur bei korrekter Anwendung Schutz. Der Benutzer wird gegen atmosphärische Partikel geschützt und sollte für die Anwendung geschult sein. Eine unsachgemäße Anwendung führt zur Gefahr von Gesundheitsschäden, die zum Tod führen können.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-7040-675 in Übereinstimmung mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7040 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces masques. Grâce à la norme FFP2, protégez-vous efficacement contre les particules atmosphériques.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 masques
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Classe de protection	FFP2 NR
Norme	EN149:2001+A1:2009
Organisme notifié	Nr. 0598 SHS FIMKO OY Takomotie 800380 HELSINKI, Finland



Conditions de stockage et durée de validité :

Les emballages encore scellés doivent être stockés à une température comprise entre -20 °C et 30 °C et à une humidité relative inférieure à 80 %. La durée de conservation est de trois ans à partir de la date de production.



IMPORTANT !

Lisez attentivement le mode d'emploi et les avertissements avant utilisation. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.



Enfiler et éliminer le masque :

1. Lavez-vous et séchez-vous soigneusement les mains avant de mettre le masque.
2. Prenez le masque par les boucles, le pince-nez tourné vers l'extérieur. Alignez le pince-nez sur votre nez, couvrez votre bouche et votre nez, puis tirez les boucles sur vos oreilles.
3. Pressez le pince-nez sur l'arête de votre nez pour l'ajuster et assurer une bonne tenue sur le visage.
4. Pour vérifier l'étanchéité, appuyez les bords du masque sur votre visage avec vos mains. Inspirez fortement. Si de l'air pénètre par le pince-nez, réglez-le à nouveau. Si de l'air arrive sur les côtés, ajustez les boucles. Ajustez le masque jusqu'à ce qu'il soit parfaitement étanche. Une fois le masque correctement installé, vous pouvez l'utiliser.
5. Retirez le masque après utilisation et jetez-le. Saisissez le masque par les boucles et tirez-le vers l'avant. Jetez le masque dans un conteneur à déchets fermé ou conservez-le dans un conteneur étanche jusqu'à son élimination.
6. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir retiré le masque.



NOTES :

1. Vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
2. Évitez de toucher l'intérieur du masque pour assurer sa propreté.
3. Évitez de toucher le masque lorsque vous le portez.
4. Retirez et jetez les masques trempés.
5. Le masque est un produit jetable et ne doit donc pas être réutilisé.
6. Ne portez pas ce masque si vous avez des difficultés respiratoires.
7. Le masque est déconseillé aux enfants.
8. L'efficacité du masque peut être altérée par votre pilosité faciale.
9. Les masques marqués NR ne doivent pas être utilisés pendant plus d'un quart de travail.



ATTENTION !

Le masque n'offre une protection que s'il est utilisé correctement. L'utilisateur est protégé contre les particules atmosphériques s'il respecte le mode d'emploi. Une mauvaise utilisation entraîne un risque d'atteinte à la santé, qui peut entraîner la mort.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-7040 conforme au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.