

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen HdO-Hörverstärkers.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hörverstärker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1x digitaler HdO-Hörverstärker HV-900
- 3x Ohrpass-Stücke (vers. Größen)
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Reinigungsbürste
- 1x Aufbewahrungsbox
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil

Technische Daten

Akku-Typ	Li-Ion-Akku, 35 mAh
Rating	5 Volt DC
Ladezeit	2,5 Stunden
Betriebszeit	Bis zu 22 Stunden
Verstärkungsleistung	bis zu 43 dB ± 3 dB
Minimale Verzerrung	≤ 3 % + 3 %
Frequenzgang	300 – 4.500 Hz
Maximale Lautstärke	bis zu 125 dB ± 3 dB
Eingangs-Lautstärke	29 dB ± 3 dB
Schutzart	IP21
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung
Maße	38 × 15 × 10 mm
Gewicht	4 g



ACHTUNG!

Hörverstärker sind nicht zum dauerhaften Tragen geeignet. Suchen Sie bei Verdacht auf Hörschwäche einen HNO-Facharzt auf oder führen Sie einen Test beim Akustiker durch.



HINWEIS:

Solange das Gerät nicht korrekt im Ohr angebracht ist, können Rückkopplungen und Störgeräusche auftreten.

Produktdetails

1. Silikon-Tip
2. Lautstärke-Regler
3. Ein-/Aus/Modus-Taste
4. Mikrofon


Inbetriebnahme



HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Bei der ersten Aufladung kann der Ladevorgang länger als 2,5 Stunden dauern.

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Aus/Modus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Gerät und einem geeigneten Netzteil.
3. Die Ein-/Aus/Modus-Taste leuchtet rot.
4. Die Ein-/Aus/Modus-Taste leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
5. Testen Sie, welches Silikon-Tip am besten zu Ihrer Ohrform passt.
6. Befestigen Sie das Silikon-Tip am Ende des Lautsprechers.

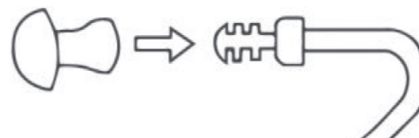

Verwendung

1. Gerät aufsetzen

Das Gerät kann sowohl am rechten als auch am linken Ohr getragen werden. Achten Sie darauf, dass keine Haare auf das Mikrofon fallen. Dies kann Störgeräusche verursachen. Ziehen Sie das Gerät niemals am Ohrschlauch zurecht.

1. Setzen Sie das Silikon-Tip in Ihr Ohr ein.
2. Platzieren Sie das Gehäuse des Geräts hinter dem Ohr. Brillenträger müssen das Ohr etwas zur Seite ziehen, um eine Lücke für das Gehäuse zu schaffen.



HINWEIS:

Tragen Sie den Hörverstärker, während Sie ihn einstellen. Beim Einstellen erhalten Sie durch Pieptöne Rückmeldungen.

2. Gerät einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Es ertönen 3 kurze Pieptöne, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

3. Gerät ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Es ertönen 2 kurze Pieptöne, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

4. Lautstärke einstellen

Drücken Sie die + am Lautstärke-Regler, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie - am Lautstärke-Regler, um die Lautstärke zu senken.

5. Modus einstellen

Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-/Modus-Taste, um zwischen 4 verschiedenen Modi durchzuschalten. Ein Tonsignal gibt an, welcher Modus ausgewählt ist.

Modus	Tonsignal	Geeignet für
P1: Normal	1 Piepton	Ruhige Umgebungen, z. B. zu Hause oder im Büro.
P2: Geräusch- unterdrückung	2 Pieptöne	Laute Umgebungen, z. B. Supermarkt oder Restaurant.
P3: Konversation	3 Pieptöne	Gespräche in Zimmerlautstärke.
P4: Außenbereich	4 Pieptöne	Außenbereiche, z. B. im Straßenverkehr oder Menschenmengen.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit der Reinigungsbürste oder einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen oder aggressiven Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Silikon-Tip regelmäßig mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.

Gesundheitshinweise

- Menschen, die glauben unter einer Hörschwäche zu leiden,

- sollten einen HNO-Facharzt aufsuchen bzw. einen Hörtest beim Akustiker durchführen.
- Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Gerät um kein medizinisches Produkt handelt.
 - Suchen Sie bitte einen Arzt auf, falls Teile des Geräts im Ohr steckenbleiben.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer Mittelohrentzündung leiden oder anderen akuten Erkrankungen des Gehörgangs leiden. Bei Tinnitus oder Hörsturz sollten Sie unbedingt Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, bevor Sie das Gerät verwenden.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht für längere Zeit bei voller Lautstärke, dies kann zu Hörschäden führen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn Sie Schmerzen oder andere Beschwerden empfinden.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Haut am Ohr gerötet und von einem Ausschlag befallen ist.
 - Ziehen Sie bei folgenden Symptomen ein Arzt zu Rate, bevor Sie das Gerät verwenden:
 - Während einer Ohrenbehandlung.
 - Wenn Sie an Ohrenschmerzen leiden.
 - Wenn das Ohr von Geburt oder durch einen Unfall deformiert ist.
 - Falls Sie Anfälle von Gehörlosigkeit oder plötzliche Gehörlosigkeit erleben.
 - Falls Sie an akuten oder chronischen Schwindel leiden.
 - Falls sich Ohrenschmalz oder Fremdkörper im Ohr angestaut haben.
 - Falls sich die Haut am Ohr rötet oder diese jucken sollte.
 - Falls Sie einen Haut-Ausschlag am Ohr bekommen.
 - Falls sich Ihr Hörvermögen verschlechtert haben sollte.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Gerätes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Gerät nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn es Schäden aufweist, darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht von Kleinkindern unter 3 Jahren verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Kindern fern.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in lauten Umgebungen und an Orten, an denen mit einer plötzlichen Veränderung des Umgebungslärms zu rechnen ist, wie z. B. im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz. Sollten Umgebungsgeräusche unangenehm laut verstärkt werden, regeln Sie den Hörverstärker herunter oder nehmen Sie es ganz vom Ohr.
- Geräte mit starken elektromagnetischen Feldern, wie z. B. Lautsprecher, können den Hörverstärker ebenfalls stören und zu lauten Störgeräuschen führen. Halten Sie entsprechend Abstand zu solchen Geräten oder verwenden Sie den Hörverstärker nicht in der Nähe solcher Geräte.
- Dieses Gerät darf aus hygienischen Gründen nicht von mehreren Personen geteilt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie schlafen.
- Das Gerät ist nicht zum dauerhaften Tragen geeignet.
- Säubern Sie das Gerät regelmäßig, um die Leistung des Geräts aufrecht zu erhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, feuchten, explosiven und gefährlichen Umgebungen.
- Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie das Gerät an heißen Tagen nicht im Auto liegen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Laden Sie das Gerät auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben, um Schäden am Akku zu vermeiden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum integrierten Akku und dessen Entsorgung

- Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht

- in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt -10 – 55 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8294-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8294 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet amplificateur de son. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 amplificateur de son numérique 43 dB HV-900
- 3 embouts (tailles différentes)
- 1 câble de chargement USB
- 1 brosse de nettoyage
- 1 boîte de rangement
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Chargeur secteur USB

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Batterie lithium-ion, 35 mAh
Alimentation	5 V DC
Temps de chargement	2,5 h
Autonomie	Jusqu'à 22 h
Puissance d'amplification	Jusqu'à 43 dB ± 3 dB
Distorsion minimale	≤ 3 % + 3 %
Réponse fréquentielle	300 à 4500 Hz
Volume sonore max.	Jusqu'à 125 dB ± 3 dB
Volume d'entrée	29 dB ± 3 dB
Indice de protection	IP21
Classe de protection III	Protection par basse tension
Dimensions	38 × 15 × 10 mm
Poids	4 g



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



ATTENTION !

Les amplificateurs de son ne sont pas conçus pour être portés en permanence. En cas de suspicion de déficience auditive, consultez un spécialiste ORL ou effectuez un test chez un audioprothésiste.



NOTE :

Si l'appareil n'est pas placé correctement dans l'oreille, vous risquez d'entendre du larsen et des bruits parasites.

Description du produit

1. Embout en silicone
2. Réglage Volume
3. Bouton Marche/Arrêt/Mode
4. Microphone


Mise en marche



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Lors du premier chargement, le processus de chargement peut durer plus de 2,5 h.

1. Éteignez l'appareil en maintenant le bouton Marche/Arrêt/Mode enfoncé pendant 3 secondes.
2. Branchez le câble de chargement à l'appareil et à un chargeur secteur adéquat.
3. Le bouton Marche/Arrêt/Mode brille en rouge.
4. Lorsque le bouton Marche/Arrêt/Mode brille en vert, la batterie est complètement rechargée.
5. Testez quel embout en silicone convient le mieux à la forme de votre oreille.
6. Fixez l'embout en silicone à l'extrémité de l'amplificateur.

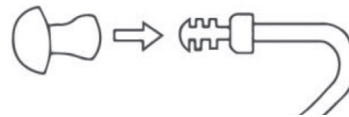

Utilisation

1. Mettre l'appareil en place

L'appareil peut être porté aussi bien sur l'oreille droite que sur l'oreille gauche. Veillez à ce qu'aucun cheveu ne tombe sur le microphone. Cela peut provoquer des bruits parasites. Ne tirez jamais sur le tube de l'oreille pour ajuster l'appareil.

1. Insérez l'embout en silicone dans votre oreille.
2. Placez le boîtier de l'appareil derrière l'oreille. Si vous portez des lunettes, vous devez tirer légèrement l'oreille sur le côté afin de créer un espace pour le boîtier.



NOTE :

Portez l'amplificateur pendant que vous le réglez. Lors du réglage, vous recevez des bips de confirmation.



2. Allumer l'appareil

Maintenez le bouton Marche/Arrêt/Mode appuyé pendant 3 secondes. Vous entendrez 3 bips courts lorsque l'appareil sera mis en marche.

3. Éteindre l'appareil

Maintenez le bouton Marche/Arrêt/Mode appuyé pendant 3 secondes. Vous entendrez 2 bips courts lorsque l'appareil sera éteint.

4. Régler le volume

Appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton Volume - pour baisser le volume.

5. Régler le mode

Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt/Mode pour passer d'un mode à l'autre (4 modes différents). Un signal sonore indique le mode sélectionné.

Mode	Signal sonore	Convient pour
P1 : Normal	1 signal sonore	Environnements calmes, par exemple à la maison ou au bureau.
P2 : Réduction du bruit	2 signaux sonores	Environnements bruyants, par exemple supermarché ou restaurant.
P3 : Conversation	3 signaux sonores	Conversations à volume réduit.
P4 : En extérieur	4 signaux sonores	Zones extérieures, par exemple dans la circulation routière ou la foule.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil avec la brosse de nettoyage ou un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de solvant ou de liquide nettoyant abrasif ou agressif. Nettoyez régulièrement l'embout en silicone avec un désinfectant approprié.

Consignes importantes pour la santé

- Les personnes pensant souffrir d'une perte d'acuité auditive doivent consulter un médecin ORL et si besoin effectuer un test de l'audition auprès d'un acousticien.
- Le produit ne constitue pas un dispositif médical.
- Consultez un médecin si des parties de l'appareil restent coincées dans votre oreille.
- N'utilisez pas le système audio si vous souffrez d'otite moyenne ou d'autres maladies aiguës du canal auditif. Si vous souffrez d'acouphènes ou de perte auditive, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'amplificateur de son à plein volume pendant une période prolongée : cela peut causer des dommages auditifs.
- Arrêtez d'utiliser l'amplificateur de son si vous ressentez une

- douleur ou d'autres désagréments.
- N'utilisez pas l'appareil si la peau de votre oreille est rouge ou couverte d'une éruption cutanée.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous présentez les symptômes suivants :
- Pendant un traitement des oreilles.
- Si vous souffrez de douleurs aux oreilles
- Si l'oreille est déformée à la naissance ou suite à un accident.
- Si vous avez des crises de surdité ou une surdité soudaine.
- Si vous souffrez de vertiges aigus ou chroniques.
- Si du cérumen ou des particules étrangères se sont accumulées dans l'oreille.
- Si la peau de l'oreille est rouge ou démange.
- Si vous avez une éruption cutanée sur l'oreille.
- Si votre audition s'est détériorée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Tenir hors de portée des enfants. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition. /// Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive. /// Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// Toute

modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des dommages visibles, il ne doit pas être utilisé. /// N'utilisez pas l'amplificateur de son dans des environnements bruyants et / sujets à de brusques variations sonores (sur la route, un lieu de travail, etc.). Si les bruits environnants sont amplifiés de manière désagréable, baissez l'amplificateur ou retirez-le complètement de l'oreille. /// Les appareils à fort champ électromagnétique, tels que les haut-parleurs, peuvent également interférer avec l'amplificateur de son et provoquer un bruit fort. Tenez-vous à distance de ces appareils ou n'utilisez pas l'amplificateur auditif à proximité de ces appareils. /// Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une personne à la fois. /// N'utilisez pas l'appareil pendant que vous dormez. /// L'appareil n'est pas conçu pour être porté en permanence. /// Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir ses performances. /// N'utilisez pas l'appareil dans des environnements chauds, humides, explosifs ou dangereux. /// N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne laissez pas l'appareil dans la voiture par temps chaud. /// Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Rechargez l'appareil si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter d'endommager la batterie. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries intégrées

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez

régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le laisser chargé à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre -10 et 55 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-8294 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.