

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Urinbeutel. Dank ihnen haben Sie nun eine Notfall-Toilette jederzeit griffbereit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Urinbeutel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 12 Urinbeutel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Fassungsvermögen	Je 700 ml
Saugstarkes Pad im Inneren	Ja
Maße	13 x 33 x 0,3 cm
Gewicht	190 g

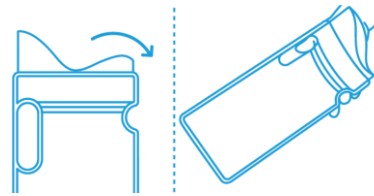
Produktdetails

1. Beutelöffnung
2. Reißverschluss (innenliegend)
3. Haltegriffe

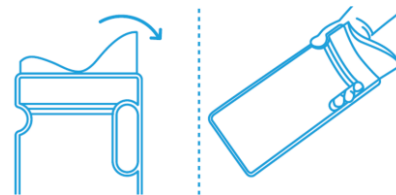
Verwendung**1. Männer****HINWEIS:**

Sie können den Urinbeutel im Stehen oder im Sitzen verwenden.

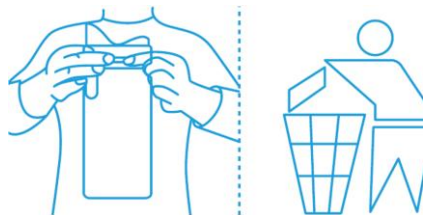
Öffnen Sie den Reißverschluss des Urinbeutels und halten Sie den erhöhten Rand der Beutelöffnung weg vom Körper. Halten Sie den Beutel in einem passenden Winkel.

**2. Frauen**

Öffnen Sie den Reißverschluss des Urinbeutels und halten Sie den erhöhten Rand der Beutelöffnung zum Körper hin. Halten Sie den Beutel in einem passenden Winkel.

**Entsorgung**

Schließen Sie nach der Verwendung den Reißverschluss des Urinbeutels und entsorgen Sie ihn im Abfall.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bitte fern von Kindern halten
- Vor Sonnenstrahlung schützen, nicht hohen Temperaturen aussetzen.
- An gut belüfteten Ort aufbewahren
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces urinoirs. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 12 urinoirs de poche
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité	700 ml
Patch absorbant interne	Oui
Dimensions	13 x 33 x 0,3 cm
Poids	190 g

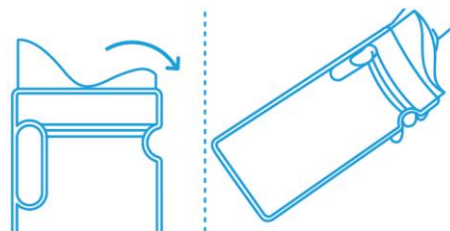
Description du produit

1. Ouverture de la poche
2. Fermeture à glissière (interne)
3. Poignée

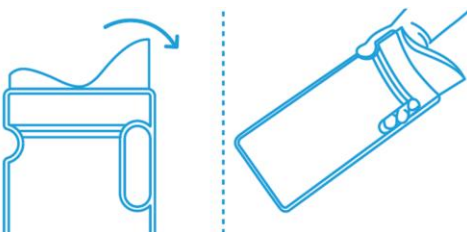
Utilisation**1. Hommes****NOTE :**

Vous pouvez utiliser l'urinoir en position debout ou assise.

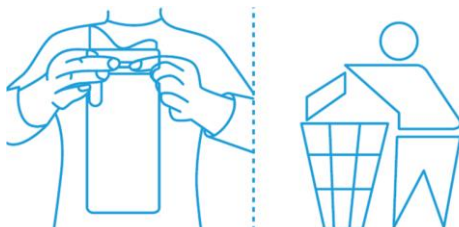
Ouvrez la fermeture à glissière de l'urinoir. Apposez ensuite l'urinoir contre votre corps, la partie basse de l'ouverture contre votre peau. Inclinez l'urinoir selon l'angle qui vous convient.

**2. Femmes**

Ouvrez la fermeture à glissière de l'urinoir. Apposez ensuite l'urinoir contre votre corps, la partie surélevée de l'ouverture contre votre peau. Inclinez l'urinoir selon l'angle qui vous convient.

**Traitement des déchets**

Après utilisation, fermez la fermeture à glissière de l'urinoir et jetez-le à la poubelle.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Protégez le produit des rayons du soleil, ne l'exposez pas à des températures élevées.
- Conservez le produit dans un endroit bien aéré.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**